

Polly PAL[™]

Placeringshjälpmedel för spädbarn
Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP-fri.

Polly PAL[™] är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på många olika sätt. Den är fylld med mikroskivor av plast som känns silkeslena vid beröring.

VARNINGAR:

- Endast för sjukhusanvändning.
- Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika att lägga hela vikten eller för många mikroskivor ovanpå små spädbarn.
- Placera inte nära spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
- För att förhindra korskontaminering mellan patienter, tvätta och torka enligt sjukhusets policy.

Om mikroskivorna någon gång skulle lossna eller om det uppstår ett hål i tygöverdraget, kassera omedelbart.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

Polly PAL är en tvättbar och återanvändbar produkt.



Maskintvätta och torka i temperatur upp till 71 °C.
Klorfritt blekmedel rekommenderas.

BRUKSANVISNING:

Polly PAL är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på många olika sätt.

- Placera runt spädbarnets huvud eller fötter för att skapa en gräns, hjälpa till att bibehålla ett läge eller ge en känsla av säkerhet.
- Använd den för att stödja en napp eller stödjande slangar.
- Flytta mikroskivorna på olika ställen för att göra delar eller sektioner fylligare eller mindre fulla för att passa utrustning eller spädbarnets placeringsbehov.

KASSERING och FÖRVARING:

Inga speciella krav.

Kontakta DandleLION Medical med alla eventuella frågor eller kommentarer eller för att rapportera alla eventuella problem med användningen av vår produkt.

Ver:0621

