

## AVSEDD ANVÄNDNING/ KLINISK FÖRDEL:

Dandle ROO2 är ett återanvändbart stödsystem för neuroutveckling som kan användas för prematura och sjuka spädbarn inlagda på sjukhus i mag-, rygg- och sidolägen. Dandle ROO2 kommer med en basenhet som har en bifogad huvudrulle och påse och en multifunktionsrulle med Velcro®-flikar. Ytterligare tillbehör inkluderar ett löstagbar brätte och en gelkudde med bomullsöverdrag. Bildinstruktioner finns tillgängliga online på [www.dandleLIONmedical.com](http://www.dandleLIONmedical.com).

## VARNINGAR/KONTRAINDIKATIONER:

- Endast för sjukhusanvändning.
- Placera inte vingar eller påse runt spädbarnets hals eller ansikte och använd den inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
- Tvätta tygkomponenterna mellan patienter
- Övervaka spädbarnets temperatur för att förhindra överhettning.
- Se till att kardborrefästen sitter fast ordentligt genom att trycka ihop dem från båda sidor. Undvik kontakt mellan kardborrbandet och spädbarnets hud.

## RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

Maskintvätta och torka alla tygkomponenter vid temperaturer upp till 71°C. Högre temperaturer kommer att orsaka ytterligare krympning. Kontrollera produkten visuellt efter varje tvättning. ROO2 kommer att hålla bättre om alla kardborrband är fästa under tvättning.



## BRUKSANVISNING:

Välj rätt DandleROO2-storlek enligt spädbarnets vikt och kroppsproportioner.

### MAGLÄGE:

1. Om extra gelkudde används, placera den inuti basen antingen i vertikalt läge för att stödja huvudet och bålen eller i horisontellt läge så att kudden stödjer spädbarnets huvud och nacke.
2. Placera spädbarnets huvud så att det vidrör toppen på huvudrullen. Se till att huvudet och bålen stöds så att huvudet och ryggraden är neutralt inriktade, knän och höfter är böjda och axlarna är rundade framåt så att armarna faller naturligt med händerna nära ansiktet.
3. Dra den kortare vingen över armarna. Dra den längre vingen över den kortare vingen och fäst i kardborrbandet på undersidan. Justera enligt spädbarnets behov och medicinska tillstånd.
4. Böj spädbarnets nedre extremiteter till ett neutralt mittlinjeläge. Om så önskas, placera multifunktionsrullen upp mot spädbarnets skinkor och stöd bäckenet genom att luta den bakåt som om spädbarnet sitter i en gunga. Fäst rullen på undersidan av basen med tillräcklig spänning för att stödja höfter och bäcken.
5. Ordna den medicinska utrustningen säkert runt placeringshjälpen.
6. Håll spädbarnets ben böjda, dra upp påsen runt barnet och fäst först det mittersta kardborrbandet på kardborrutan i mitten, sedan sidoremsorna på kardborrbandet på baksidan.
7. Justera ena eller båda sidorna av huvudgränsen genom att vika den över och fästa den med kardborreband. Se till att andningsutrustning är korrekt och säkert placerad och att luftvägarna förblir fria.
8. Om brättetillbehör används, justera det så att det blockerar direkt infallande ljus.

### RYGGLÄGE:

1. Om extra gelkudde används, placera den inuti basen antingen i vertikal riktning för stöd av huvud och bålen eller i horisontellt läge med kudden som stöder spädbarnets huvud och hals i korrekt inriktning med kroppen.
2. Placera barnet på rygg i placeringshjälpen med spädbarnets huvud i kontakt med toppen på huvudrullen.
3. För in de övre extremiteterna i mittlinjeböjning med händerna nära ansiktet. Dra den kortare vingen över armarna och runda skulderna framåt. Dra den längre vingen över den kortare vingen och fäst i kardborrbandet på undersidan. Justera enligt spädbarnets behov och medicinska tillstånd.

4. Böj spädbarnets nedre extremiteter till ett neutralt mittlinjeläge. Placera multifunktionsrullen upp mot spädbarnets skinkor och stöd bäckenet genom att luta den bakåt som om barnet sitter i en gunga. Fäst rullen på undersidan av basen med tillräcklig spänning för att stödja höfter och bäcken.
5. Ordna den medicinska utrustningen säkert runt placeringshjälpen.
6. Håll spädbarnets ben böjda, dra upp påsen runt barnet och fäst först det mittersta kardborrbandet på kardborrrutan i mitten, sedan sidoremsorna på kardborrbandet på baksidan. Obs! Vik ner påsen och fäst den var som helst längs sidorna om navelområdet behöver synas bättre.
7. Justera ena eller båda sidorna av huvudgränsen genom att vika den över och fästa den med kardborreband. Se till att andningsutrustning är korrekt och säkert placerad och att luftvägarna förblir fria.
8. Om brättetillbehör används, justera det så att det blockerar direkt infallande ljus.

#### LIGGANDE I SIDOLÄGE:

1. Om gelkudde används, placera den inuti basen i antingen horisontellt eller vertikalt läge beroende på spädbarnets storlek och behov.
2. Lägg barnet i sidoläge på gelkudden med spädbarnets huvud inbäddat mot den övre gränsen.
3. Se till att båda axlarna är böjda framåt och att ben och höfter är löst böjda.
4. Vik flikarna på multifunktionsrullen mot rullkroppen så att spädbarnets hud inte vidrör fästelementen. Använd rullen bakom ryggen, som kroppskudde eller efter behov.
5. För den längre vingen över axlarna för att hjälpa till att bibehålla böjning och bra kroppsställning. Fäst på undersidan av basen med kardborreband.
6. För upp påsen och håll benen löst böjda. Se till att den nedre änden av påsen är tillgänglig för fotstöd. Fäst på undersidan av basen med kardborreband.
7. Justera ena eller båda sidorna av huvudgränsen genom att vika över den och fästa den på botten/sidan med kardborreband. Kontrollera placeringen av ledningar eller slangar och se till att det inte finns några hinder för spädbarnets andning.
8. Om brättetillbehör används, justera det så att det blockerar direkt infallande ljus.

#### FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

*DEHP-fri, BPA-fri, ej tillverkad av naturlig gummilatex*

Kontakta Dandle•LION Medical om du har några frågor eller kommentarer eller för att rapportera eventuella problem med användningen av vår produkt.

Ver8:1022



DandleLION Medical  
www.dandleLIONmedical.com

22 Shelter Rock Lane  
203-791-9001

Danbury, CT 06810  
© DandleLION Medical 2021