


Snuggly ROO™ för engångsbruk

Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP- och BPA-fri.

Snuggly ROO för engångsbruk är en neuroutvecklingsstödande placeringshjälp som kan användas för prematura och sjuka spädbarn intagna på sjukhus i mag-, rygg- eller sidoläge.

VARNINGAR:

- Endast för sjukhusanvändning.
- Placera inte remmar runt spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
- Endast för användning med en enda patient. Får inte återanvändas med flera patienter. 

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

Kassera på lämpligt sätt efter att produkten blivit smutsig eller efter patientanvändning. Får inte återanvändas med flera patienter.

BRUKSANVISNING:

- Välj rätt storlek av Snuggly ROO för engångsbruk enligt spädbarnets vikt och kroppsproportioner.
- Lägg Snuggly ROO för engångsbruk i inkubatorn, värmaren eller spjålsängen med fotrullen i botten på sängen och remmarna bort åt sidorna.
- Placera spädbarnet i Snuggly ROO för engångsbruk i mag-, rygg- eller sidoläge så att spädbarnets ben böjs på lämpligt sätt mot fotrullen och huvudet och ryggraden är neutralt inriktade.
- Placera spädbarnets händer nära ansiktet i ett böjt läge.
- Dra en rem över spädbarnets axel och arm för att hjälpa till att hålla spädbarnets händer i ett bekvämt, böjt läge nära ansiktet.
- Stoppa in remmen under Snuggly ROO för engångsbruk så att spädbarnets vikt håller den på plats.
- Dra remmen på motsatta sidan över den andra axeln och armen för att hjälpa till att bibehålla lämplig böjning och stoppa in den under. Liggande i sidoläge kanske inte den andra remmen behövs.
- För att bibehålla det önskade läget kan vårdgivaren använda en Polly PAL™, Dandle® PAL eller Cozy Cub™ för att stödja spädbarnets huvud och hindra spädbarnet från att sparka ut ur fotrullen.
- Kontrollera alla ledningar och slangar efter att ha placerat spädbarnet för att säkerställa korrekt och säker placering.

OBS! Om bättre synlighet av barnet behövs kan remmarna placeras bort åt sidan.

KASSERING och FÖRVARING:

Inga speciella krav.

Kontakta DandleLION Medical med alla eventuella frågor eller kommentarer eller för att rapportera alla eventuella problem med användningen av vår produkt.

Ver1:1022