

# Mini PAL™ -

## Avtorkningsbar

Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP-fri.



### AVSEDD ANVÄNDNING/ KLINISKA FÖRDELAR:

Polly PAL är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på många olika sätt. Mini PAL har en ytterpåse och en innerpåse som är fylld med silkeslena mikroskivor.

### VARNINGAR/FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för användning på sjukhus.
- Placera inte nära barnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
- Rengör enligt sjukhusets policyer för att förhindra korskontaminering mellan patienter.
- För att förhindra tillväxt av några inre föroreningar, kontrollera regelbundet det avtorkningsbara överdraget för synliga tecken på skada eller slitage. Kassera om det är nödvändigt.
- Använd alltid med överdrag.
- Om produktens utsida punkteras eller på annat sätt skadas, kasta omedelbart.

### RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

- Dandle PAL är en avtorkningsbar och återanvändbar produkt som ska torkas ren med ett standarddesinfektionsmedel för sjukhus varje gång den blir smutsig och mellan patientanvändningstillfällen.
- Engångsöverdraget är avsett för användning med en enda patient och ska kasseras på lämpligt sätt.

För Mini PAL tygöverdrag (Tillgängligt tillbehör):

- Maskintvätta och torka i temperatur upp till 71°C.
- Klorfritt blekmedel rekommenderas.



### BRUKSANVISNING:

Mini PAL är ett flexibelt positioneringshjälpmedel som kan användas på olika sätt för alla spädbarn och har utvecklats för spädbarn < 800 g. När Mini PAL används i XS Dandle® R002, Dandle® R00 Lite eller Dandle® WRAP Stretch fyller Mini PAL utrymmet längst ner i påsen för att förbättra produktens funktionalitet.

- I ryggläge, med barnets huvud upp mot huvudrullen, placera den större basdelen ("kroppen") i utrymmet från barnets botten till där påsen möter basen. Barnets ben ska vila ovanpå "kroppen" i en bakre bäckenlutning. Använd Mini PAL-"benen" för att krypa upp bredvid bålen, under armarna, fylla upp utrymmet och hjälpa till att hålla höfter och axlar i böjning. Med Mini PAL inuti lägesställaren kommer vingarna och påsen att passa in ordentligt.
- Med barnet i sidoläge, placera "kroppen" bakom barnet och lägg de lätta "benen" över barnets axlar och höfter för att behålla sin position eller ge en känsla av komfort och säkerhet.
- Kan användas med större bebisar för att stödja korrekt positionering, ge proprioceptiv feedback eller stödja slangar/utrustning.
- Om ingen headroll är tillgänglig och mittlinjens huvudpositionering är motiverad, placera Mini PAL runt barnets huvud med "benen" under barnets axlar, stödjande armar i flexion.
- Om lemförlängning är nödvändig, placera "kroppen" under leden och "benen" ovanför och under leden för att hålla den i förlängning.

### FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

Kontakta Dandle•LION Medical om du har några frågor eller kommentarer eller för att rapportera eventuella problem med användningen av vår produkt.

Ver. 1:0323



DandleLION Medical  
www.dandleLIONmedical.com

22 Shelter Rock Lane  
203-791-9001

Danbury, CT 06810  
© DandleLION Medical 2021