

Mini PAL™ - Afneembaar



Niet gemaakt van natuurlijk latexrubber. Vrij van DEHP.

BEOOGD GEBRUIK / KLINISCH VOORDEEL:

De Mini PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden. De Mini PAL heeft een buitenzak en een binnenzak die gevuld is met zijdeachtige microschijsjes.

WAARSCHUWINGEN / VOORZORGSMATREGELEN:

- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Niet in de buurt van de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Reinigen volgens de richtlijnen van het ziekenhuis om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen.
- Om eventuele interne besmetting te voorkomen, moet u de afneembare hoes regelmatig controleren op zichtbare tekenen van schade of slijtage. Weggooien indien nodig.
- Gebruik altijd met hoës.
- Als de buitenkant van het product beschadigd raakt, gooi het dan onmiddellijk weg.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

- De Mini PAL is een afneembaar en herbruikbaar product dat moet worden afgenomen met een standaard quaternair ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen wanneer het vuil is geworden en na gebruik bij elke patiënt.
- De wegwerphoes is voor eenmalig gebruik en moet onmiddellijk worden weggegooid.

Voor stoffen hoezen van Mini PAL (beschikbaar accessoire):

- In de machine wassen en drogen tot een temperatuur van 71°C.
- Bleekmiddel zonder chloor wordt aanbevolen.



GEBRUIKSAANWIJZING:

De Mini PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering dat op verschillende manieren kan worden gebruikt voor alle baby's en is speciaal ontwikkeld voor baby's < 800 g. Bij gebruik in de XS Dandle® R002, Dandle® ROO Lite of Dandle® WRAP Stretch, vult de Mini PAL de ruimte aan de onderkant op om de functionaliteit van het product te verbeteren.

- Terwijl de baby op de rug ligt, met zijn hoofdje tegen de hoofdrol, plaatst u het grotere basisstuk ("lichaam") tegen het gedeelte vanaf de billen van de baby tot waar de zak de basis raakt. De benen van de baby moeten bovenop het "lichaam" rusten in een achterwaartse bekkenkanteling. Gebruik de "benen" van de Mini PAL om naast de romp, onder de armen, ruimte op te vullen en heupen en schouders in flexie te houden. Met de Mini PAL in de positioner zullen de vleugels en het zakje goed uitgelijnd zijn.
- Met de baby in zijligging, plaatst u het "lichaam" achter de baby en legt u de lichtgewicht "benen" over de schouders en heupen van de baby om de positie te behouden of om een gevoel van comfort en veiligheid te geven.
- Kan worden gebruikt bij grotere baby's om de juiste positionering te ondersteunen, proprioceptieve feedback te geven of om slangen/apparatuur te ondersteunen.
- Als er geen hoofdrol beschikbaar is en het hoofdje in het midden moet worden geplaatst, plaats dan Mini PAL om het hoofdje van de baby met de "benen" onder de schouders van de baby en ondersteun de armen in flexie.
- Als de ledematen moeten worden gestrekt, plaatst u het "lichaam" onder het gewricht en de "benen" boven en onder het gewricht om het gestrekt te houden.

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Neem contact op met Dandle-LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft of als u problemen met het gebruik van ons product wilt melden.

Rev 1:0323



DandleLION Medical
www.dandleLIONmedical.com

22 Shelter Rock Lane
203-791-9001

Danbury, CT 06810
© DandleLION Medical 2021