

Mini PAL^{MC} – Lavable

Ne contient pas de caoutchouc de latex naturel. Sans DEHP.



UTILISATION PRÉVUE / AVANTAGE CLINIQUE:

Le Mini PAL est un accessoire d'aide au positionnement. Il est flexible et peut être utilisé de différentes manières. Le Mini PAL comporte un coussin extérieur et un coussin intérieur rempli de micro-disques soyeux.

AVERTISSEMENTS / ATTENTION:

- Destiné uniquement à un usage hospitalier.
- Évitez de placer l'accessoire près du cou ou du visage du bébé ou d'en faire un usage qui pourrait obstruer ses voies respiratoires.
- Pour éviter la contamination croisée entre les patients, nettoyez l'accessoire conformément aux politiques de l'hôpital.
- Afin d'éviter la croissance de tout contaminant interne, inspectez régulièrement le revêtement lavable pour vous assurer qu'il ne présente pas de signe visible de détérioration ou d'usure. Mettez-le au rebut si nécessaire.
- Utilisez-le toujours avec une housse.
- Si l'extérieur du produit est perforé ou compromis d'une quelconque manière, mettez-le au rebut immédiatement.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

- Le Mini PAL est un produit lavable et réutilisable qui doit être nettoyé à l'aide d'un désinfectant quaternaire standard d'hôpital dès qu'il est souillé et entre deux utilisations.

- La housse jetable est destinée à n'être utilisée que par un seul patient et doit être mise au rebut immédiatement.



Pour les housses en tissu Mini PAL (accessoire disponible) :

- Le lavage et le séchage en machine doivent être effectués à une température maximale de 71 °C.
- Il est recommandé d'utiliser un agent de blanchiment sans chlore.



MODE D'EMPLOI:

Le Mini PAL est un accessoire d'aide au positionnement flexible qui peut être utilisé de différentes manières pour tous les bébés. Il a été spécialement conçu pour les bébés de moins de 800 g. Lorsqu'il est utilisé à l'intérieur du XS Dandle^{MD} ROO2, du Dandle^{MD} ROO Lite, ou du Dandle^{MD} WRAP Stretch, le Mini PAL comble l'espace au fond de la housse afin d'améliorer la fonctionnalité du produit.

- En position couchée sur le dos, la tête du bébé est appuyée contre le support de tête. Veillez à placer la plus grande pièce de base (« corps ») dans l'espace allant des fesses du bébé jusqu'à l'endroit où la housse rejoint la base. Les jambes du bébé doivent reposer sur le dessus du « corps » dans une inclinaison pelvienne postérieure. Utilisez les « jambes » du Mini PAL pour blottir le torse du bébé en dessous de ses bras. Cela permet de remplir l'espace et aide à garder les hanches et les épaules en flexion. Grâce au Mini PAL placé à l'intérieur du positionneur, les ailes et la pochette s'alignent correctement.
- Lorsque le bébé est couché sur le côté, placez le « corps » derrière le bébé et placez les « jambes » légères sur les épaules et les hanches du bébé pour le maintenir en position ou lui procurer un sentiment de confort et de sécurité.
- Peut être utilisé avec des bébés plus grands pour faciliter le positionnement, fournir une rétroaction proprioceptive ou soutenir les tubes/équipements.
- Si aucun support de tête n'est disponible et que le positionnement de la tête suivant la ligne médiane est justifié, placez un Mini PAL autour de la tête du nourrisson avec les « jambes » sous les épaules du bébé, en maintenant les bras en flexion.
- Si une extension des membres est nécessaire, placez le « corps » sous l'articulation et les « jambes » au-dessus et en-dessous de l'articulation pour les maintenir en extension.

RANGEMENT ET MISE AU REBUT:

Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou que souhaitez signaler un problème relatif à l'utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle-LION Medical.

Rév. 1:0323

