

Mini PAL™ - Abwischbar

Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt. DEHP-frei.



ZWECKBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:

Der Mini PAL ist eine flexible Lagerungshilfe, die auf vielfältige Weise verwendet werden kann. Der Mini PAL hat eine Außentasche und eine Innentasche, die mit seidigen Mikroscheiben gefüllt ist.

WARNHINWEISE / VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nur für den Krankenhausgebrauch.
- Nicht in der Nähe des Halses oder des Gesichts des Babys platzieren oder auf eine Weise verwenden, welche die Atemwege des Babys einengen.
- Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination unter Patienten gemäß den Krankenhausvorschriften reinigen.
- Um die Entwicklung innerer Verunreinigungen zu verhindern, überprüfen Sie die abwischbare Abdeckung regelmäßig auf sichtbare Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Bedarf entsorgen.
- Immer mit Überzug verwenden.
- Wenn die Außenseite des Produkts durchstoßen oder auf andere Weise beeinträchtigt wird, sofort wegwerfen.

REINIGUNGSHINWEISE:

- Der Mini PAL ist ein abwischbares und wiederverwendbares Produkt, das nach jeder Verunreinigung und nach dem Gebrauch durch Patienten mit einem Standarddesinfektionsmittel mit quaternären Verbindungen für den Krankenhausgebrauch abgewischt werden sollte.
- Der Einwegüberzug ist für den Gebrauch bei einem einzigen Patienten bestimmt und muss danach sofort entsorgt werden. 

Für Mini-PAL-Stoffüberzüge (verfügbares Zubehör):

- Maschinenwäsche und Trocknen bei einer Temperatur von bis zu 71 °C.
- Es wird ein chlorfreies Bleichmittel empfohlen.



GEBRAUCHSHINWEISE:

Der Mini PAL ist eine flexible und vielseitig einsetzbare Lagerungshilfe für alle Babys und wurde bewusst für Babys <800 g entwickelt. Bei Verwendung im XS Dandle® ROO2, Dandle® ROO Lite oder Dandle® WRAP Stretch füllt der Mini PAL den Raum am Boden des Beutelbereichs aus, um die Produktfunktionalität zu verbessern.

- Legen Sie in Rückenlage, mit dem Kopf des Babys gegen die Kopfrolle, das größere Basisteil („Körper“) in den Raum zwischen dem Po des Babys und der Stelle, an der der Beutel auf die Basis trifft. Die Beine des Babys sollten auf dem „Körper“ in einer hinteren Beckenneigung ruhen. Verwenden Sie die Mini PAL „Beine“, um sie neben den Oberkörper unter die Arme zu kuscheln, den Raum auszufüllen und dabei zu helfen, Hüften und Schultern gebeugt zu halten. Mit dem Mini PAL im Positionierer richten sich die Flügel und der Beutel richtig aus.
- Wenn sich das Baby in Seitenlage befindet, platzieren Sie den „Körper“ hinter dem Baby und legen Sie die leichten „Beine“ über die Schultern und Hüften des Babys, um die Position beizubehalten oder ein Gefühl von Komfort und Sicherheit zu vermitteln.
- Kann bei größeren Babys verwendet werden, um die richtige Positionierung zu unterstützen, propriozeptives Feedback zu geben oder Schläuche/Geräte zu stützen.
- Wenn keine Kopfrolle verfügbar ist und eine Mittellinienpositionierung des Kopfes gewährleistet ist, platzieren Sie Mini PAL um den Kopf des Babys, wobei die „Beine“ unter den Schultern des Babys liegen und die Arme in Flexion stützen.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

Bitte wenden Sie sich an Dandle·LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.

Rev 1:0323

