

Tapis apaisant Tranquilo[®]

Ne contient pas de caoutchouc de latex naturel. Sans DEHP.

Le tapis apaisant Tranquilo à piles est un outil efficace pour apaiser les bébés irritables et difficiles à consoler. Les quatre niveaux de vibration et les deux choix de rythme impulsif supplémentaires peuvent être facilement modifiés en appuyant sur un bouton.

Le tapis apaisant Tranquilo est distribué aux hôpitaux par DandleLION Medical.


AVERTISSEMENTS / MISES EN GARDE

- **Usage hospitalier uniquement.**
- **Ne pas planter d'aiguilles dans le tapis apaisant Tranquilo, car cela peut compromettre l'intégrité du revêtement et entraîner un risque de contamination/infection.**
- **Inspecter le tapis avant chaque utilisation pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. Cesser d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.**
- **Précautions concernant les piles:**
 - » **Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées.**
 - » **Ne pas mélanger piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium, lithium-ion).**
 - » **Jeter les piles conformément à la législation en vigueur.**
 - » **Bien fermer le compartiment à piles et la fermeture éclair pour éviter tout accès non autorisé aux piles.**

NETTOYAGE

- Le tapis peut être essuyé avec un désinfectant hospitalier standard entre deux patients.
- Ne pas utiliser de désinfectants à base de phénol.
- Les housses blanches jetables sont à usage unique et ne doivent pas être réutilisées d'un patient à l'autre.

MODE D'EMPLOI

- Quatre piles AA sont nécessaires au fonctionnement du dispositif. Dézipper le compartiment à piles située à l'extrémité du tapis. Retirer le boîtier à piles et placer 4 piles AA à l'intérieur du compartiment. Respecter le sens « +/- » pour le positionnement des piles. Remettre le boîtier à piles en place dans son compartiment et fermer la fermeture éclair.
- Mettre la housse jetable.
- Appuyer sur le bouton d'alimentation (identifié par le symbole ) pendant 3 secondes pour allumer le tapis en vue d'une utilisation continue - OU -
- Continuer à maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant cinq secondes après le début des vibrations pour activer une fonction d'arrêt automatique après 60 minutes.
- Sélectionner le mode voulu en appuyant sur le bouton Mode (identifié par le symbole « M ») jusqu'à ce que le mode souhaité soit activé.
- Ordre des MODES:
 - Vibrations très faibles
 - Vibrations faibles
 - Vibrations moyennes
 - Vibrations fortes
 - Vibrations faibles avec pulsations lentes
 - Vibrations fortes avec pulsations rapides
- Placer le nourrisson sur le tapis.
- Éteindre le tapis en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton d'alimentation.

GARANTIE

- Garantie limitée d'un an.
- Durée de vie prévue du moteur : 2000 heures.

Rev2:0823