

# Dandle·LION Cozy Cub™

The Dandle·LION Cozy Cub is een herbruikbare positioneringsbegrenzing die kan worden gebruikt bij gehospitaliseerde baby's.

## WAARSCHUWINGEN:

- Niet in de buurt van het gezicht van de baby plaatsen of gebruiken op een manier die de ademhaling kan belemmeren.
- Altijd gebruiken met een hoes.
- Houd de 'lus' uit de buurt van de vingers en tenen van de baby.
- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Steek GEEN naalden door de hoes heen in de Cozy Cub.

## WAARSCHUWINGEN:

- Wees extra voorzichtig en voorkom dat enig onderdeel van de Cozy Cub op de baby wordt geplaatst.
- Controleer regelmatig de Cozy Cub regelmatig op zichtbare tekenen van schade of slijtage, zoals sneden, scheuren, barsten, gaatjes, haken en ogen of vlekken.
- Verwijderde Cozy Cub onmiddellijk bij zichtbare tekenen van vlekken, schade of slijtage.

## REINIGINGSINSTRUCTIES:

- Voor hergebruik de Cozy Cub afvegen met een standaard quaternair ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen. De wegwerphoes is voor gebruik door één patiënt en moet op gepaste wijze worden verwijderd.

## GEBRUIKSAANWIJZING:

De Dandle·LION Cozy Cub is een flexibel positioneringshulpmiddel dat kan worden gebruikt voor baby's met verschillende medische aandoeningen. Volg, ongeacht de positie, de doelstellingen voor patiëntenzorg van:

- A. Buiging
- B. Omsluiting
- C. Middellijn
- D. Mogelijkheid om vrij te bewegen en om terug te rollen
- E. 360-graden proprioceptie indien mogelijk

De Cozy Cub houdt de baby in bedwang en zorgt ervoor dat hij of zij goed zichtbaar is. Het is te gebruiken om de baby volledige in te sluiten of, door weg te vouwen, gedeeltelijke te ondersteunen. De 'lus' aan het uiteinde van de hoes kan worden gebruikt om een stevigere, nauwere insluiting te maken door het andere uiteinde door de lus te halen. De interne parels kunnen worden verplaatst om meer of minder steun te bieden aan de baby of aan medische apparatuur.

- Rugligging: Zorg voor een volledige of gedeeltelijke insluiting rond de baby. Verzeker de ondersteuning van schouders, heupen en benen om een goede buiging te ondersteunen
- Zijligging: Gebruik Cozy Cub om te voorkomen dat de baby zich omrolt, om de handen tegen het gezicht te houden en om de onderste ledematen te buigen.
- Buikligging: Zorg ervoor dat hoofd en nek op één lijn liggen, dat de romp ondersteund wordt en dat de heupen in bekkenkanteling worden gebracht. Gebruik de Cozy Cub om de baby in deze gebogen en ingesloten positie te houden.

## OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Neem contact op met Dandle·LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft of om een probleem met het gebruik van ons product te melden.

Rev3:0721