

Dandle•LION Cozy Cub™

Le Dandle•LION Cozy Cub est une barrière de positionnement réutilisable qui peut être utilisée pour les bébés hospitalisés.

AVERTISSEMENTS :

- Évitez de le placer près du visage du bébé ou d'en faire un usage qui pourrait obstruer ses voies respiratoires.
- Utilisez-le toujours avec une housse.
- Tenez la « boucle » de l'extrémité de la housse loin des doigts ou des orteils du nourrisson.
- Destiné uniquement à un usage hospitalier.
- N'enfoncez PAS des aiguilles dans le Cozy Cub à travers la housse.

ATTENTION :

- Il faut faire particulièrement attention à ne pas mettre en contact une quelconque partie du Cozy Cub avec une partie du corps du bébé.
- Inspectez régulièrement le Cozy Cub pour vous assurer qu'il ne présente pas de signes visibles de dommage ou d'usure, telles que coupures, déchirures, fissures, micro-trous, accrocs ou taches. Mettez immédiatement au rebut le Cozy Cub s'il présente des signes visibles de tache, de dommage ou d'usure.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

- Le corps du Cozy Cub est réutilisable et peut être essuyé à l'aide d'un désinfectant quaternaire standard d'hôpital. La housse jetable est destinée à n'être utilisée que par un seul patient et doit être mise au rebut dans les règles.

MODE D'EMPLOI :

Le Dandle•LION Cozy Cub est un accessoire d'aide au positionnement flexible, qui peut être utilisé chez les nourrissons souffrant de diverses pathologies. Quelle que soit la position, vous devez respecter les objectifs de soins aux patients suivants :

- A. Flexion
- B. Rétention
- C. Ligne médiane
- D. Capacité à bouger et à se recroqueviller librement
- E. Proprioception à 360 degrés si possible

Le Cozy Cub permet de confiner le bébé tout en offrant une visualisation complète de celui-ci. Il peut être utilisé comme une barrière complète ou replié de manière à ne soutenir que partiellement le bébé. La « boucle » de l'extrémité de la housse peut être utilisée pour créer une barrière plus petite et plus sûre en faisant passer l'extrémité opposée à travers la boucle. Les billes de l'intérieur peuvent être déplacées pour offrir plus ou moins de soutien au bébé ou à tout matériel médical.

- Décubitus dorsal : Formez une barrière complète ou partielle autour du nourrisson. Assurez de soutenir les épaules, les hanches et les jambes afin de permettre une bonne flexion.
- Décubitus latéral : Utilisez le Cozy Cub pour empêcher le bébé de se retourner, pour maintenir ses mains sur son visage et assurer la flexion de ses membres inférieurs.
- Décubitus ventral : Assurez que la tête et le cou soient correctement alignés, que le tronc soit soutenu et que les hanches soient ramenées en bascule pelvienne. Utilisez le Cozy Cub pour maintenir le bébé dans cette position fléchie et contenue.

RANGEMENT et MISE AU REBUT :

Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou souhaitez signaler un problème relatif à l'utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle •LION Medical.

Rev3:0721