

Dandle•LION Cozy Cub™

El Cozy Cub de Dandle • LION es un límite de posicionamiento reutilizable que se puede utilizar para bebés hospitalizados.

ADVERTENCIAS:

- No lo coloque cerca de la cara del bebé ni lo use de ninguna manera que pueda obstruir las vías respiratorias.
- Úselo siempre con una funda.
- Mantenga el "lazo" al final de la funda lejos de los dedos de las manos o de los pies del bebé.
- Solo para uso hospitalario.
- NO introduzca agujas en el Cozy Cub a través de la funda.

PRECAUCIONES:

- Se debe tener especial cuidado para evitar colocar cualquier parte del Cozy Cub sobre cualquier parte del bebé.
- Revise periódicamente el Cozy Cub para detectar cualquier signo visible de daño o desgaste, como cortes, roturas, grietas, agujeros, desgarros o manchas.
- Deseche inmediatamente el Cozy Cub si tiene algún signo visible de manchas, daños o desgaste.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

- El cuerpo del Cozy Cub es reutilizable y se puede limpiar con un desinfectante cuaternario estándar para hospitales. La funda descartable es de un solo uso para el paciente y debe desecharse adecuadamente.

INSTRUCCIONES DE USO:

El Cozy Cub de Dandle•LION es una ayuda de posicionamiento flexible que puede utilizarse en bebés que padecen una variedad de problemas de salud. Independientemente de la posición, siga los objetivos de cuidado del paciente relacionados con lo siguiente:

- A. Flexión
- B. Contención
- C. Línea media
- D. Capacidad de movimiento libre y de retroceso
- E. Propiocepción de 360 grados cuando sea posible

El Cozy Cub proporciona contención y, a la vez, permite una visualización completa del bebé. Puede usarse como un límite completo o doblarse para proporcionarle un soporte parcial al bebé. El "lazo" del extremo de la funda puede utilizarse para crear un límite más seguro y pequeño tirando del extremo opuesto a través del lazo. Las cuentas internas pueden moverse para proporcionar un mayor o menor soporte al bebé o a cualquier equipo médico.

- En posición supina: Coloque un límite total o parcial alrededor del bebé. Asegúrese de apoyar los hombros, las caderas y las piernas para propiciar una flexión adecuada.
- En posición lateral: Utilice el Cozy Cub para evitar que el bebé se dé la vuelta, para mantener las manos en la cara y para que las extremidades inferiores se mantengan flexionadas.
- En posición prona: Asegúrese de que la cabeza y el cuello estén alineados, que el tronco tenga soporte y que las caderas se inclinen hacia la pelvis. Utilice el Cozy Cub para mantener al bebé en esta posición flexionada y contenida.

ALMACENAMIENTO y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Comuníquese con Dandle • LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario
o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.

Rev3:0721