

Polly PAL™

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex. Vrij van DEHP.



BEOOGD GEBRUIK / KLINISCH VOORDEEL:

Polly PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden. Het is gevuld met plastic microschiiven, die zijdezacht aanvoelen.

WAARSCHUWINGEN:

- **Alleen voor ziekenhuisgebruik.**
- **Wees extra voorzichtig met kleine baby's en voorkom dat ze het volledige gewicht of te veel microschiiven bovenop zich krijgen.**
- **Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.**
- **Ter voorkoming van kruisbesmetting tussen patiënten, volgens de voorschriften van het ziekenhuis wassen en drogen.**
- **Onmiddellijk wegwerpen ingeval er ooit microschiiven losraken of een gaatje in de stoffen bekleding komt.**

REINIGINGSVOORSCHRIFTEN:

De Polly PAL is een wasbaar en herbruikbaar product.

- In de machine wassen en drogen tot een temperatuur van 71°C.
- Aangeraden wordt een bleekmiddel dat geen shloor bevat.



GEBRUIKSAANWIJZING:

De Polly PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden.

- Rond baby's hoofd of voeten plaatsen ter afbakening, ter behoud van een positie of om een gevoel van veiligheid te geven.
- Te gebruiken als ondersteuning van een fopspeen of een slang.
- Verplaats de microschiiven om delen voller of minder vol te maken, naargelang de vereisten van de apparatuur of de positie van de baby.

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Voor vragen, opmerkingen of het melden van een probleem met het gebruik van ons product, neem contact op met Dandle•LION Medical.

Rev 1:1122

