

Polly PAL™

Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP-fri.



AVSEDD ANVÄNDNING / KLINISK FÖRDEL:

Polly PAL är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på många olika sätt. Den är fylld med mikroskivor av plast som känns silkeslena vid beröring.

VARNINGAR:

- Endast för sjukhusanvändning.
- Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika att lägga hela vikten eller för många mikroskivor ovanpå små spädbarn.
- Placera inte nära spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
- För att förhindra korskontaminering mellan patienter, tvätta och torka enligt sjukhusets policy.
- Om mikroskivor någon gång skulle lossna eller om det uppstår ett hål i tygöverdraget, kassera omedelbart.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

Polly PAL är en tvättbar och återanvändbar produkt.

- Maskintvätta och torka i temperatur upp till 71°C.
- Klorfritt blekmedel rekommenderas.



BRUKSANVISNING:

Polly PAL är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på många olika sätt.

- Placera runt spädbarnets huvud eller fötter för att skapa en gräns, hjälpa till att bibehålla ett läge eller ge en känsla av säkerhet.
- Använd den för att stödja en napp eller stödja slangar.
- Flytta mikroskivorna på olika ställen för att göra delar eller sektioner fylligare eller mindre fulla för att passa utrustning eller spädbarnets placeringsbehov.

FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

Kontakta Dandle-LION Medical om du har några frågor eller kommentarer eller för att rapportera eventuella problem med användningen av vår produkt.

Rev 1:1122



DandleLION Medical
www.dandleLIONmedical.com

22 Shelter Rock Lane
203-791-9001

Danbury, CT 06810
© DandleLION Medical 2021