

## USO PREVISTO/ BENEFICIO CLÍNICO:

Dandle PAL es una ayuda de posicionamiento flexible que se puede utilizar de diversas formas. El PAL dispone de dos bolsas internas rellenas de microdiscos sedosos: una bolsa más grande que rellena la herradura y otra más pequeña cerca de la correa de sarga.

## ADVERTENCIAS/CONTRAINDICACIONES:

- Solo para uso hospitalario.
- Se debe tener especial cuidado para evitar colocar todo el peso o demasiados microdiscos encima de los bebés pequeños.
- No lo coloque cerca del cuello o la cara del bebé ni lo use de ninguna manera que pueda restringir sus vías respiratorias.
- Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, límpielo según las políticas del hospital.
- Para evitar que las bolitas se salgan del producto y supongan un peligro para el bebé, inspeccione regularmente la tela para detectar posibles daños y deséchelo si es necesario.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Dandle PAL es un producto lavable y reutilizable.

- Lavar a máquina y secar a una temperatura de hasta 71 °C.
- Se recomienda blanqueador sin cloro.



## INSTRUCCIONES DE USO:

Dandle PAL es una ayuda de posicionamiento flexible que se puede utilizar de diversas formas.

- La parte de la herradura o las "patas" pueden colocarse alrededor de la cabeza o los pies del bebé para crear un límite, ayudar a mantener una posición o darle una sensación de seguridad.
- La bolsa más pequeña puede colocarse encima de la más grande si se necesita un límite más alto. La bolsa más pequeña puede mantenerse en su lugar tirando de la correa que se encuentra debajo de la parte de la herradura.
- La herradura se puede abrir completamente y colocar detrás de un bebé en posición lateral para ayudar a mantener la posición y mantener al bebé en flexión. La bolsa más pequeña se puede atar encima de la más grande para evitar que el bebé se mueva hacia atrás.
- La bolsa más pequeña puede utilizarse para sujetar tubos de soporte.
- Los microdiscos pueden desplazarse dentro de las "patas" para que estén más llenas o más vacías y se adapten mejor a las necesidades médicas y de desarrollo del bebé.

## ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

*No fabricado con caucho de látex natural. Libre de DEHP.*

Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.

Rev 8:1123

