

## AVSEDD ANVÄNDNING/ KLINISK FÖRDEL:

Dandle PAL™ är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på en mängd olika sätt. PAL har två interna påsar fyllda med silkeslena mikroskivor: en större påse som fyller hästskoformen och en mindre påse nära twillbandet.

## VARNINGAR/KONTRAIKATIONER:

- Endast för sjukhusanvändning.
- Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika att lägga hela vikten eller för många mikroskivor ovanpå små spädbarn.
- Placera inte nära spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
- Rengör enligt sjukhusets policyer för att förhindra korskontaminering mellan patienter.
- Kontrollera regelbundet efter skador i tyget och kassera omedelbart vid behov, för att undvika att pärlor faller ur produkten och orsakar fara för barnet.

## RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

Dandle PAL är en tvättbar och återanvändbar produkt.

- Maskintvätta och torka i temperatur upp till 71°C.
- Klorfritt blekmedel rekommenderas.



## BRUKSANVISNING:

Dandle PAL är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på en mängd olika sätt.

- Hästskodelen, eller ”benen”, kan placeras runt spädbarnets huvud eller fötter för att skapa en gräns, hjälpa till att bibehålla en ställning eller ge en känsla av trygghet.
- Den mindre påsen kan placeras ovanpå den större om en högre gräns behövs. Den mindre påsen kan hållas på plats genom att dra i bandet under hästskodelen.
- Hästskon kan öppnas brett och läggas bakom ett spädbarn som ligger i sidoläge för att hjälpa till att bibehålla ställningen och hålla barnet i ett böjt läge. Den mindre påsen kan spännas fast ovanpå den större för att förhindra att barnet rullar tillbaka.
- Den mindre påsen kan användas till att ge stöd åt slangar.
- Mikroskivorna i ”benen” kan flyttas runt för att göra dem mer eller mindre fylliga så att de på bästa sätt stödjer bebisens medicinska behov och utvecklingsbehov.

## FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

*Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP-fri.*

Kontakta Dandle•LION Medical om du har några frågor eller kommentarer eller för att rapportera eventuella problem med användningen av vår produkt.

