

Dandle® WRAP en Dandle® WRAP Stretch

Zonder DEHP, zonder BPA, niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex.

BEOOGD GEBRUIK / KLINISCH VOORDEEL:

De Dandle WRAP en de Dandle WRAP Stretch zijn herbruikbare positioneringshulpmiddelen die kunnen worden gebruikt bij in het ziekenhuis opgenomen baby's ter ondersteuning van de neurologische ontwikkeling terwijl de baby slaapt, eet, in bad wordt gedaan of vastgehouden. Het kan ook worden gebruikt om steun te bieden tijdens procedures of terwijl de baby in behandeling is. De Dandle WRAP biedt extra ondersteuning voor lage tonus en premature baby's met inachtneming van de 'Back to Sleep'-richtlijnen.

WAARSCHUWINGEN / CONTRA-INDICATIES:

- **Alleen voor ziekenhuisgebruik.**
- **Plaats de vleugels of de buidel niet om de hals of het gezicht van de baby en gebruik ze niet zodanig de ademhaling van de baby wordt belemmerd.**
- **Bij gebruik tussen patiënt reinigen volgens de richtlijnen van het ziekenhuis.**
- **Controleer de temperatuur van de baby om oververhitting te voorkomen.**
- **Zorg ervoor dat het klittenband goed vast zit door het aan beide kanten samen te drukken. Vermijd contact tussen de klittenband en de huid van de baby.**

REINIGINGSINSTRUCTIES:

- In de machine wassen met watertemperaturen tot 71°C. Gebruik alleen chloorvrijbleekmiddel. Het product blijft een beter staat houden als de klittenbandsluitingen dicht zijn tijdens het wassen. Droog trommelen op middelhoge temperatuur.



GEBRUIKSAANWIJZING:

Kies de juiste maat Dandle WRAP, overeenkomstig de grootte en de lichaamsverhoudingen van de baby.

1. Plaats Dandle WRAP op een ondersteunend oppervlak met de vleugels naar de zijkanten en de zak geopend aan de onderkant. De klittenbandlus moet aan de buitenkant op de rug zitten.
2. Plaats de baby in rugligging op de WRAP met de bovenkant van de schouders op een lijn net onder de bovenkant van de WRAP.
3. Plaats de bovenste ledematen gebogen op de middelijn met de handen dichtbij het gezicht. Haal de kortere wikkel over de schouder, naar beneden over de armen en rond de schouder weer naar voren. Haal de langere wikkel over de bovenkant, rond de schouders en sluit de armen comfortabel in. Bevestig aan het klittenbandvierkant aan de achterkant van de positioner. Pas het geheel aan de behoeften van de baby en de medische toestand aan.
4. Buig baby's onderste ledematen in een neutrale middenlijnpositie en ondersteun het bekken in een achterwaartse hoek.
5. Organiseer alle slangen en medische apparatuur, zodanig dat ze veilig aan de zijkant naar buiten gaan.
6. Haal de zak over de voeten en benen. Aan de achterkant vastmaken. Aanpassen aan de behoeften van de baby en de medische toestand.
7. Mag onder medisch toezicht in elke positie (buikligging, rugligging en zijligging) worden gebruikt.

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale voorwaarden.

'BACK TO SLEEP' RICHTLIJNEN voor gebruik met Dandle WRAP en Dandle WRAP Stretch:

Volg alle instructies behalve:

- a. Stap 3: Zorg ervoor dat de WRAP goed rond het gezicht van de baby blijft zitten door deze stevig met de sluitingen te bevestigen of door de kortere draagdoek onder de oksels van de baby te door te halen in plaats van over de schouders en zo te voorkomen dat de baby zich naar beneden beweegt in de WRAP.
- b. Stap 7: Voor het slapen de baby altijd op zijn/haar rug leggen.



Neem contact op met Dandle•LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft of om een probleem met ons product te melden.

Rev 6A:0424