

Cozy Cub™

No fabricado con caucho de látex natural. Sin DEHP.

Dandle•LION®
MEDICAL

USO PREVISTO / BENEFICIO CLÍNICO:

El Cozy Cub es un límite de posicionamiento reutilizable, en tres tamaños, que se puede utilizar para bebés hospitalizados.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES:

- No lo coloque cerca de la cara del bebé ni lo use de ninguna manera que pueda obstruir las vías respiratorias.
- Úselo siempre con una funda.
- Mantenga el 'lazo' al final de la funda lejos de los dedos de las manos o de los pies del bebé.
- Solo para uso hospitalario.
- NO introduzca agujas en el Cozy Cub a través de la funda.
- Se debe tener especial cuidado para evitar colocar cualquier parte del Cozy Cub sobre cualquier parte del bebé.
- Revise periódicamente el Cozy Cub para detectar cualquier signo visible de daño o desgaste, como cortes, roturas, grietas, agujeros, desgarros o manchas.
- Deseche inmediatamente el Cozy Cub si tiene algún signo visible de manchas, daños o desgaste.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

- El Cozy Cub se puede limpiar con un desinfectante cuaternario estándar para hospitales.
- La funda descartable es de un solo uso para el paciente y debe desecharse adecuadamente.



Para fundas de tela del Cozy Cub (accesorio disponible):

- Lavar a máquina y secar a una temperatura de hasta 71°C.
- Se recomienda usar blanqueador sin cloro.



INSTRUCCIONES DE USO:

El Cozy Cub de es una ayuda de posicionamiento flexible que puede utilizarse en bebés que padecen una variedad de problemas de salud. Independientemente de la posición, sigue los 5 Tenets™ para un posicionamiento adecuado: flexión, contención, alineación de la línea media, 360° de propiocepción y libertad de movimiento y retroceso.

El Cozy Cub proporciona contención y, a la vez, permite una visualización completa del bebé. Puede usarse como un límite completo o doblarse para proporcionarle un soporte parcial al bebé. El "lazo" del extremo de la funda puede utilizarse para crear un límite más seguro y pequeño tirando del extremo opuesto a través del lazo. Los discos internos de seda pueden moverse para proporcionar un mayor o menor soporte al bebé o a cualquier equipo médico.

- En posición supina: Coloque un límite total o parcial alrededor del bebé. Asegúrese de apoyar los hombros, las caderas y las piernas para propiciar una flexión adecuada.
- En posición lateral: Utilice el Cozy Cub para evitar que el bebé se dé la vuelta, para mantener las manos en la cara y para que las extremidades inferiores se mantengan flexionadas.
- En posición prona: Asegúrese de que la cabeza y el cuello estén alineados, que el tronco tenga soporte y que las caderas se inclinen hacia la parte posterior de la pelvis. Utilice el Cozy Cub para mantener al bebé en esta posición flexionada y contenida.
- Ideal para bebés cuyo estado requiera la elevación de la cabecera de la cama.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.



DandleLION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009

EC REF

Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta

Rev 4A:0424