


Jednorázová pomůcka Snuggly ROO™

Není vyrobena z přírodního gumového latexu. Neobsahuje DEHP a BPA.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / KLINICKÝ PŘÍNOS:

Jednorázová podložka Snuggly ROO je z hlediska neurologického vývoje podpůrná polohovací pomůcka, kterou lze použít pro hospitalizované předčasně narozené a nemocné děti v poloze na břiše, na zádech nebo na boku.

UPOZORNĚNÍ / KONTRAINDIKACE:

- Určeno pouze pro použití v nemocnici.
- Neumíst'ujte popruhy kolem šíje nebo obličeje dítěte ani je nepoužívejte způsobem, který by mohl omezit dýchací cesty kojence.
- Použití pro jednoho pacienta. Nepoužívejte opakovaně mezi pacienty. 

POKYNY K ČIŠTĚNÍ:

Po znečištění produktu nebo po použití pacientem jej vhodným způsobem zlikvidujte. Nepoužívejte znovu mezi pacienty.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Vybte správnou velikost jednorázové podložky Snuggly ROO podle hmotnosti a tělesných proporcí dítěte.
- Vložte jednorázovou podložku Snuggly ROO s podnožkou ve spodní části lůžka a popruhy po stranách do inkubátoru, ohřívače nebo postýlky.
- Umístěte dítě do jednorázové podložky Snuggly ROO v poloze na břiše, na zádech nebo na boku tak, aby se nožičky dítěte správně vyflexovaly v prostoru podnožky a hlavička a páteř byly v neutrální poloze.
- Umístěte ruce dítěte do prostoru poblíž obličeje v ohnuté poloze.
- Přetáhněte jeden popruh přes rameno a paži dítěte, abyste mu pomohli udržet ruce v pohodlné ohnuté poloze u obličeje.
- Popruh zastrčte pod jednorázovou podložku Snuggly ROO tak, aby ho váha dítěte udržela na místě.
- Přetáhněte popruh na protilehlé straně přes druhé rameno a paži, abyste pomohli udržet odpovídající flexi a zastrčte ho pod ně. Při poloze na boku nemusí být nutné použít druhý popruh.
- K udržení požadované polohy může pečovatel/ka použít pomůcky Polly PAL™, Dandle® PAL nebo Cozy Cub™, aby dítěte poskytl/a oporu v oblasti hlavičky a zabránil/a mu "odkopat se" z podnožky.
- Po polohování dítěte zkontrolujte všechna vedení a hadičky, abyste se ujistili o správném a bezpečném umístění.

POZNÁMKA: Pokud je potřeba na dítěte lépe vidět, lze popruhy umístit na stranu.

LIKVIDACE A SKLADOVÁNÍ:

Bez zvláštních požadavků.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nebo nahlášení jakéhokoli problému s používáním našeho výrobku se obraťte na společnost Dandle•LION Medical.

