


Einwegprodukt Snuggly ROO™

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. DEHP- und BPA-frei.

ZWECKBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:

Das Einwegprodukt Snuggly ROO ist eine Lagerungshilfe zur Förderung der neuronalen Entwicklung, das für hospitalisierte Frühgeborene und kranke Säuglinge in Bauch-, Rücken- oder Seitenlage verwendet werden kann.

WARNHINWEISE / VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nur für den Krankenhausgebrauch.
- Die Bänder nicht um den Hals oder das Gesicht des Säuglings legen oder auf eine Weise verwenden, welche die Atemwege des Säuglings einengen könnten.
- Ein-Patienten-Produkt. Keine Verwendung durch mehrere Patienten. 

REINIGUNGSHINWEISE:

Nach Verunreinigung des Produkts oder nach der Verwendung durch den Patienten ordnungsgemäß entsorgen. Keine Verwendung durch mehrere Patienten.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Wählen Sie die ordnungsgemäß Größe des Einwegprodukts Snuggly ROO entsprechend dem Gewicht und den Körperproportionen des Säuglings.
- Legen Sie das Einwegprodukt Snuggly ROO in den Inkubator, auf die Wärmedecke oder das Kinderbett mitt der Fußrolle am unteren Ende des Babynests sowie den Bändern seitlich angeordnet.
- Legen Sie den Säugling in Bauch-, Rücken- oder Seitenlage in das Einwegprodukt Snuggly ROO, so dass die Beine des Säuglings entsprechend an der Fußrolle gebeugt sind und Kopf und Wirbelsäule neutral ausgerichtet sind.
- Platzieren Sie die Hände des Säuglings in einer gebeugten Position nahe am Gesicht.
- Legen Sie ein Band über Schulter und Arm des Säuglings, um die Hände des Säuglings in einer bequemen, gebeugten Position nahe am Gesicht zu halten.
- Klemmen Sie das Band unter das Einwegprodukt Snuggly ROO, damit das Gewicht des Säuglings es in Position hält.
- Legen Sie das Band auf der gegenüberliegenden Seite über die andere Schulter und Arm, um die ordnungsgemäße Beugung beizubehalten und klemmen Sie es unter das Produkt. In Seitenlage wird das zweite Band möglicherweise nicht benötigt.
- Zur Beibehaltung der gewünschten Position, kann die Pflegeperson ein Polly PAL™ oder Dandle® verwenden PAL oder Cozy Cub™ dient als Stütze des Säuglingskopfes und verhindert ein Freistrampeln der Füße von der Fußrolle.
- Überprüfen Sie alle Kabel und Schläuche nach der Lagerung des Säuglings, um eine korrekte und sichere Platzierung zu gewährleisten.

HINWEIS: Die Bänder können seitlich angeordnet werden, falls eine bessere Sicht auf den Säugling erforderlich ist.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

Bitte wenden Sie sich an Dandle•LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.

