

Jednorazowy otulacz Snuggly ROO™

Niewykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP i BPA.

ZASTOSOWANIE / KORZYŚCI KLINICZNE:

Jednorazowy otulacz Snuggly ROO jest wspomagającą rozwój neurologiczny pomocą do pozycjonowania która może być używana w przypadku hospitalizowanych wcześniaków i chorych niemowląt leżących w pozycji na brzuchu, na wznak lub na boku.

OSTRZEŻENIE / PRZECIWWSKAZANIA:

- **Wyłącznie do użytku szpitalnego.**
- **Nie umieszczaj pasów wokół szyi lub twarzy dziecka ani używaj ich w sposób, który mógłby ograniczyć drożność dróg oddechowych niemowlęcia.**
- **Do użytku dla jednego pacjenta. Nie należy używać tego samego produktu u innych pacjentów.**



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:

Po zabrudzeniu produktu lub wykorzystaniu przez pacjenta należy go odpowiednio wyrzucić. Nie należy używać tego samego produktu u innych pacjentów.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

- Wybrać odpowiedni rozmiar jednorazowego otulacza Snuggly ROO dla masy i proporcji ciała niemowlęcia.
- Umieścić jednorazowy otulacz Snuggly ROO w inkubatorze, ogrzewaczu lub łóżeczku tak, by część podtrzymująca nóżki znajdowała się dole a pasy były rozłożone na boki.
- Położyć dziecko na otulaczu jednorazowym Snuggly ROO na brzuchu, na plecach lub na boku tak, aby nóżki dziecka były odpowiednio zgięte i oparte o część podtrzymującą nóżki, a głowa i kręgosłup były w neutralnym ułożeniu.
- Ułożyć dłoń dziecka w pobliżu twarzy w zgiętej pozycji.
- Przeciągnąć jeden pas nad ramieniem i przedramieniem dziecka, aby podtrzymać dłoń dziecka w wygodnej, zgiętej pozycji w pobliżu twarzy.
- Wcisnąć pas pod jednorazowy otulacz Snuggly ROO tak, by waga dziecka utrzymała go na miejscu.
- Przeciągnąć pas po drugiej stronie nad drugim ramieniem i przedramieniem, aby pomóc w utrzymaniu odpowiedniego zgięcia i wcisnąć pas pod spód. W pozycji leżącej na boku drugi pas może nie być potrzebny.
- W celu utrzymania wymaganej pozycji opiekun może użyć Polly PAL, Dandle Użyć PAL lub Cozy Cub, aby podtrzymać główkę dziecka i uniemożliwić odkopanie się z części podtrzymującej nóżki.
- Po ułożeniu dziecka należy sprawdzić wszystkie przewody i rurki, aby zapewnić ich prawidłowe i bezpieczne położenie.

UWAGA: Jeśli potrzebna jest większa widoczność dziecka, pasy można ułożyć po bokach.

UTYLIZACJA I PRZECHOWYWANIE:

Brak specjalnych wymagań.

Prosimy o kontakt z Dandle•LION Medical w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag lub w celu zgłoszenia problemów z użytkowaniem naszego produktu.

