

Snuggly ROO™ för engångsbruk

Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP- och BPA-fri.

AVSEDD ANVÄNDNING / KLINISK FÖRDEL:

Snuggly ROO för engångsbruk är en neuroutvecklingsstödande placeringshjälp som kan användas för prematura och sjuka spädbarn intagna på sjukhus i mag-, rygg- eller sidoläge.

VARNINGAR / KONTRAINDIKATIONER:

- Endast för sjukhusanvändning.
- Placera inte remmar runt spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
- Endast för användning med en enda patient. Får inte återanvändas med flera patienter.



RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

Kassera på lämpligt sätt efter att produkten blivit smutsig eller efter patientanvändning. Får inte återanvändas med flera patienter.

BRUKSANVISNING:

- Välj rätt storlek av Snuggly ROO för engångsbruk enligt spädbarnets vikt och kroppsproportioner.
- Lägg Snuggly ROO för engångsbruk i inkubatorn, värmaren eller spjålsängen med fotrullen i botten på sängen och remmarna bort åt sidorna.
- Placera spädbarnet i Snuggly ROO för engångsbruk i mag-, rygg- eller sidoläge så att spädbarnets ben böjs på lämpligt sätt mot fotrullen och huvudet och ryggraden är neutralt inriktade.
- Placera spädbarnets händer nära ansiktet i ett böjt läge.
- Dra en rem över spädbarnets axel och arm för att hjälpa till att hålla spädbarnets händer i ett bekvämt, böjt läge nära ansiktet.
- Stoppa in remmen under Snuggly ROO för engångsbruk så att spädbarnets vikt håller den på plats.
- Dra remmen på motsatta sidan över den andra axeln och armen för att hjälpa till att bibehålla lämplig böjning och stoppa in den under. Liggande i sidoläge kanske inte den andra remmen behövs.
- För att bibehålla det önskade läget kan vårdgivaren använda en Polly PAL™, Dandle® PAL eller Cozy Cub™ för att stödja spädbarnets huvud och hindra spädbarnet från att sparka ut ur fotrullen.
- Kontrollera alla ledningar och slangar efter att ha placerat spädbarnet för att säkerställa korrekt och säker placering.

OBS!: Om bättre synlighet av barnet behövs kan remmarna placeras bort åt sidan.

FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

Kontakta Dandle•LION Medical med alla eventuella frågor eller kommentarer eller för att rapportera alla eventuella problem med användningen av vår produkt.

