

# Crown Cradle™

Sans DEHP ni BPA, ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.



## UTILISATION PRÉVUE / AVANTAGE CLINIQUE:

Crown Cradle (« berceau Crown ») est un dispositif non invasif, non restrictif et réglable, disponible en deux tailles (petit pour les bébés de moins de 1 800 g et grand pour les bébés de 1 800 à 3 600 g). Chaque dispositif comporte un matelas, quatre inserts en mousse de tailles croissantes qui soutiennent la tête, une housse en tissu et d'un « bouchon » destiné à reboucher la cavité lorsque le bébé est en décubitus ventral.

## AVERTISSEMENTS / CONTREINDICATIONS:

- Destiné à être utilisé par le personnel soignant sur des bébés hospitalisés.
- Afin d'éviter l'obstruction des voies respiratoires, ne mettez pas le bébé en décubitus ventral ou décubitus latéral de telle manière que son visage se trouve dans la cavité du matelas.
- Lorsque le bébé est en décubitus dorsal, veillez à ce que son cou ne soit pas en hyperextension et que sa tête ne soit pas inclinée vers la poitrine, ce qui risquerait d'obstruer ses voies respiratoires.
- N'introduisez pas d'aiguilles ni d'épingles dans le matelas, car cela risquerait de compromettre l'intégrité de la housse du matelas et de donner lieu à une contamination ou à une infection.
- Inspectez régulièrement le matelas du Crown Cradle à la recherche d'éventuels signes visibles de dommage et jetez tout matelas endommagé.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

- Réutilisables, le matelas, le bouchon et les inserts en mousse doivent être frottés avec un désinfectant quaternaire standard d'hôpital dès qu'ils sont souillés et à chaque changement de patient.
- Lavez et séchez en machine tous les composants du linge à des températures pouvant atteindre 71°C, avec un agent de blanchiment sans chlore. Séchez par culbutage à chaleur moyenne.



## MODE D'EMPLOI:

- Posez le matelas du Crown Cradle sur le matelas du lit de l'USIN.
- Conformément au protocole de l'hôpital, procédez aux changements de position habituels.
- Veillez à placer l'équipement et les appareils médicaux de manière sécurisée lorsque le bébé se trouve sur le Crown Cradle.

### Pour mettre le bébé en décubitus dorsal ou latéral:

- Déterminez les dimensions appropriées du matelas et de l'insert en mousse en fonction du poids du bébé. Commencez par suivre les recommandations suivantes:

#### PETIT MATELAS (bébés <1800 g)

< 750 g	Inserto de espuma tamaño 1
750–1000 g	Inserto de espuma tamaño 2
1000–1400 g	Inserto de espuma tamaño 3
1400–1800 g	Inserto de espuma tamaño 4

#### GRANDE MATELAS (bébés pesant de 1800 à 3600 g)

1800–2150 g	Inserto de espuma tamaño 5
2150–2500 g	Inserto de espuma tamaño 6
2500–3050 g	Inserto de espuma tamaño 7
3050–3600 g	Inserto de espuma tamaño 8

Un insert en mousse correctement ajusté doit laisser un dégagement d'environ 3 mm tout autour de la tête du bébé. La tête, le cou et la colonne vertébrale du bébé doivent être dans une position neutre. La tête et le cou ne doivent pas être fléchis (insert en mousse trop petit) ou étendus (insert en mousse trop grand). Augmentez ou diminuez la taille de l'insert en mousse selon les besoins.

**Remarque:** Lorsque vous prenez les mensurations hebdomadaires du bébé afin d'en évaluer la croissance, vérifiez la taille de l'insert en mousse pour déterminer s'il est nécessaire de l'augmenter.

- Pour assembler le Crown Cradle:
  - Glissez le matelas dans la housse en tissu, en veillant à ce que l'évidement soit situé en haut (extrémité ouverte de la housse). La partie non matelassée de la housse de matelas doit se trouver sur l'évidement, tandis que la partie matelassée doit recouvrir la moitié inférieure du matelas.
  - Glissez l'insert en mousse de la taille souhaitée dans la poche située à l'intérieur de la housse de matelas en tissu et placez la partie en forme de coupelle dans la cavité du matelas.
  - Remontez la housse sur le matelas en veillant à stabiliser la mousse dans la cavité, et rentrez le rabat sous le matelas du Crown Cradle.
- Mettez le bébé en décubitus dorsal ou semi-latéral sur le Crown Cradle, la tête étant confortablement soutenue par l'insert en mousse:
  - Il ne faut pas mettre d'oreillers avec du gel ni d'autres aides au positionnement sous la tête du bébé.
  - Placez le bébé en position fléchie, centrée et contenue. Nous recommandons d'utiliser le Dandle® WRAP Stretch ou le Dandle® PAL ou encore le Cozy Cub™ pour obtenir une position favorable au développement. Il convient de placer un positionneur au niveau des pieds du bébé pour l'empêcher de glisser sur le matelas. Pour maintenir le bébé dans une position stable, croisez les sangles de la housse du matelas sur lui et sur toute aide au positionnement utilisée, puis rentrez les sangles sous le matelas du Crown Cradle.

#### **Pour positionner le bébé en décubitus ventral:**

- Pour positionner le bébé en décubitus ventral, retirez d'abord l'insert en mousse, puis insérez le bouchon dans la cavité du matelas de façon à ce qu'il repose à plat par rapport à la base du matelas.
- Utilisez un rouleau pour décubitus ventral ou un positionneur sous le tronc et la tête pour aider à positionner le bébé dans une position fléchie, centrée et contenue. Nous recommandons d'utiliser le Dandle WRAP Stretch ou le Dandle PAL ou encore le Cozy Cub pour obtenir une position favorable au développement. Il convient de placer un positionneur au niveau des pieds du bébé pour l'empêcher de glisser sur le matelas. Pour maintenir le bébé dans une position stable, croisez les sangles de la housse du matelas sur lui et sur toute aide au positionnement utilisée, puis rentrez les sangles sous le matelas du Crown Cradle.

#### **RANGEMENT ET MISE AU REBUT:**

Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou que souhaitez signaler un problème relatif à l'utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle•LION Medical.

Pour plus d'informations, consultez sur le site Internet de Dandle•LION Medical



Rev 2A:0824