

Crown Cradle™

DEHP- und BPA-frei, nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.



ZWECKBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:

Beim Crown Cradle handelt es sich um eine nicht-invasive, nicht-einschränkende, einstellbare Apparatur, die in zwei Größen erhältlich ist (Small für Babys <1800 g und Large für Babys von 1800–3600 g). Alle Systeme umfassen eine Matratze, vier Schaumstoffeinlagen in unterschiedlichen Größen zum Stützen des Kopfes, einen Stoffbezug und einen „Pfropfen“ zum Ausgleich der Vertiefungen, wenn das Baby in Bauchlage liegt.

WARNHINWEISE / ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN:

- Zur Anwendung durch Krankenhauspersonal mit hospitalisierten Kleinkindern.
- Zur Vermeidung einer Atemwegobstruktion das Kleinkind nicht in Bauch- oder Seitenlage positionieren, sodass sein Gesicht in einer Vertiefung der Matratze liegt.
- In Rückenlage sollte darauf geachtet werden, dass der Hals des Kindes nicht überstreckt ist und der Kopf nicht zur Brust geneigt ist, um die Atemwege nicht zu verengen. Passen Sie die Größe der Schaumstoffeinlage an, um eine korrekte Ausrichtung von Kopf und Hals zu erzielen.
- Führen Sie keine Nadeln oder Stifte in die Matratze ein, da dadurch die Unversehrtheit des Matratzenbezugs beeinträchtigt und ein Risiko für Kontaminationen/Infektionen verursacht werden kann.
- Inspizieren Sie die Crown Cradle-Matratze in regelmäßigen Abständen auf sichtbare Mängel und entsorgen Sie beschädigte Matratzen.

REINIGUNGSHINWEISE:

- Wiederverwendbare Crown Cradle-Matratzen, -Pfropfen und -Schaumstoffeinlagen sind bei jeder Verunreinigung und nach jedem Gebrauch durch Patienten mit einer krankenhausblichen quaternären Verbindung abzuwaschen.
- Alle Stoffteile bei einer Temperatur von bis zu 71°C in der Maschine mit chlorfreiem Bleichmittel waschen und trocknen. Im Trockner bei mittlerer Hitze trocknen.



GEBRAUCHSHINWEISE:

- Die Crown Cradle-Matratze auf der NICU-Bettmatratze verwenden.
- Entsprechend dem Krankenhausprotokoll routinemäßige Positionswechsel durchführen.
- Für eine sichere Platzierung von medizinischen Geräten sorgen, während das Kleinkind im Crown Cradle liegt.

Positionierung des Babys in Rücken- oder Seitenlage:

- Je nach Gewicht des Kleinkindes die geeignete Größe der Matratze und der Schaumstoffeinlage bestimmen. Beachten Sie zunächst die folgenden Empfehlungen:

KLEINE MATRATZE (Babys <1800 g)		GROßE MATRATZE (Babys 1800 à 3600 g)	
< 750 g	Schaumstoffeinlage Größe 1	1800–2150 g	Schaumstoffeinlage Größe 5
750–1000 g	Schaumstoffeinlage Größe 2	2150–2500 g	Schaumstoffeinlage Größe 6
1000–1400 g	Schaumstoffeinlage Größe 3	2500–3050 g	Schaumstoffeinlage Größe 7
1400–1800 g	Schaumstoffeinlage Größe 4	3050–3600 g	Schaumstoffeinlage Größe 8

Eine ordentlich angepasste Schaumstoffeinlage sollte auf allen Seiten des Kopfes des Kleinkindes etwa 1/8" Platz lassen. Der Kopf, der Hals und die Wirbelsäule des Kleinkindes sollten sich in neutraler Position befinden. Der Kopf und der Nacken sollten weder gebeugt (Schaumstoffeinlage zu klein) noch gestreckt (Schaumstoffeinlage zu groß) sein. Passen Sie die Größe der Schaumstoffeinlage nach Bedarf nach oben oder unten an.

Hinweis: Bei den wöchentlichen Wachstumsmessungen des Kleinkindes ist die Größe der Schaumstoffeinlage zu kontrollieren, um zu ermitteln, ob sie vergrößert werden sollte.

- Montage des Crown Cradle:
 - Legen Sie die Matratze mit der Vertiefung an der Oberseite (offenes Ende des Bezugs) in den Matratzenbezug aus Stoff ein. Der nicht wattierte Teil des Matratzenbezugs sollte über der Vertiefung liegen und der wattierte Teil sollte über der unteren Hälfte der Matratze platziert werden.
 - Legen Sie die Schaumstoffeinlage in der von Ihnen gewünschten Größe in die Tasche auf der Innenseite des Matratzenbezugs ein und platzieren Sie die Kappe im vertieften Bereich der Matratze.
 - Ziehen Sie den Bezug über die Matratze und achten Sie darauf, dass die Schaumstoffeinlage in der Vertiefung stabil aufliegt, und drücken Sie die Lasche unter der Crown Cradle-Matratze.
- Legen Sie das Kleinkind in Rückenlage oder in halbseitiger Bauchlage auf das Crown Cradle, während der Kopf des Kleinkindes bequem von der Schaumstoffeinlage abgestützt wird:
 - Unter dem Kopf des Säuglings sollten keine Gelkissen oder andere Positionierungshilfen angebracht werden.
 - Bringen Sie das Kleinkind in eine gebeugte, mittige und geschlossene Position. Zur Unterstützung der entwicklungsfördernden Positionierung empfehlen wir die Verwendung von Dandle® WRAP Stretch und/oder Dandle® PAL oder Cozy Cub™. Der Einsatz eines Positionierers an den Füßen des Kleinkindes ist hilfreich, um ein Abrutschen des Kleinkindes auf der Matratze zu vermeiden. Die Position des Kleinkindes wird dadurch stabilisiert, dass die Gurte des Matratzenbezugs über das Kleinkind sowie über alle verwendeten Positionierungshilfen gelegt und dann unter die Crown Cradle-Matratze geschoben werden.

Positionierung des Babys in der Bauchlage:

- Zur Positionierung des Kleinkindes in der Bauchlage entfernen Sie zunächst die Schaumstoffeinlage und führen dann den Pfropfen in den ausgesparten Bereich der Matratze ein, sodass er flach auf der Matratzenunterlage aufliegt.
- Mit Hilfe einer Bauchrolle oder eines Positionierers unter dem Rumpf und dem Kopf können Sie das Kleinkind in eine gebeugte, mittige und geschlossene Position bringen. Zur Unterstützung der entwicklungsfördernden Positionierung empfehlen wir die Verwendung von Dandle WRAP Stretch und/oder Dandle PAL oder Cozy Cub. Der Einsatz eines Positionierers an den Füßen des Kleinkindes ist hilfreich, um ein Abrutschen des Kleinkindes auf der Matratze zu vermeiden. Die Position des Kleinkindes wird dadurch stabilisiert, dass die Gurte des Matratzenbezugs über das Kleinkind sowie über alle verwendeten Positionierungshilfen gelegt und dann unter die Crown Cradle-Matratze geschoben werden.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

Bitte wenden Sie sich an Dandle•LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Dandle•LION Medical



Rev 2A:0824