


Dandle·LION® Gelkissen

DEHP- und BPA-frei, nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

ZWECKBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:

DandleLION Gelkissen bieten eine weiche, biegsame Oberfläche, um den Kopf und/oder den Körper des Säuglings zu stützen und zu lagern. Die Gelkissen besitzen eine geeignete Größe für die Verwendung im Dandle® ROO2 und können die Notwendigkeit einer häufigen Umlagerung reduzieren. Die Kissen bestehen aus einer weichen Polyethylenfolie, die mit einem ungiftigen Lebensmittelgel auf Wasserbasis gefüllt sind, das resistent gegen Bakterien- und Pilzbefall ist. Jedes Gelkissen ist in acht Größen erhältlich und wird mit einem Baumwollbezug geliefert, der waschbar und zwischen Patienten wiederverwendbar ist. Es sind ebenfalls Einwegbezüge erhältlich.

WARNHINWEISE / KONTRAINDIKATIONEN:

- Nur für den Krankenhausgebrauch.
- Den Säugling nicht mit dem Gesicht nach unten auf eine Art und Weise auf dem Gelkissen positionieren, welches die Atemwege des Säuglings behindern könnte.
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Nicht in der Mikrowelle erhitzen, da sich heiße Stellen bilden können.
- Immer mit Überzug verwenden.
- Röntgenaufnahmen durch das Gel ausführen, da Luft einschließen die Röntgenergebnisse verfälschen können.
- Ein-Patienten-Produkt. 

REINIGUNGSHINWEISE:

- Gelkissen: Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination unter Patienten, sind die Gelkissen für den Einweggebrauch indiziert. Jegliche Wiederverwendung der Kissen zwischen Patienten unterliegt nicht den Garantiebestimmungen des Herstellers und darf nur erfolgen, nachdem ein geeignetes Desinfektionsverfahren durch den Benutzer validiert worden ist.
- Baumwollüberzug des Gelkissens: Maschinenwäsche und Trocknen bei einer Temperatur von bis zu 71 °C (160 °F). Keine Verwendung von Chlorbleichmitteln.



GEBRAUCHSHINWEISE:

- Wärmen Sie das Gelkissen im Inkubator oder unter fließendem warmen Wasser vor, falls erforderlich. Das Gel hält die Umgebungstemperatur aufrecht.
- Legen Sie das Kissen an die gewünschte Stelle.
- Um ein höhere Kissenfüllung zu erhalten, schieben Sie das Gel auf eine Seite und schlagen Sie zur Erlangung des gewünschten Füllfaktors einen Beutelteil um.
- Nach längerer Nutzung in einer warmen Umgebung beginnt das Gel zu zerfallen. Das Gel wird wässrig und der Beutel bläht sich auf. Bitte entsorgen Sie das Kissen, falls dies eintritt.

LAGERUNG:

Unter 75°F (24°C) lagern.

PRODUKTNUMMERN:

D 0951 GP B12	D 0952 GP B12	D 0953 GP B12
D19054 GP B6	D 0955 GP B12	D 0956 GP B12
D 0958 GP B12	D 0959 GP B12	D 14510 GP B12
D 14520 GP B12	D 14530 GP B12	D 14555 GP B12
D 14556 GP B12	D 14558 GP B12	D 14559 GP B12

ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

Bitte wenden Sie sich an Dandle·LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.



Rev10G:0824