

# Mini PAL™: limpiable

No fabricado con caucho de látex natural. Libre de di(2-etilhexil) ftalato [di(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP].

## USO PREVISTO:

Ofrecer apoyo para posicionar a los bebés, sobre todo a los de muy bajo peso al nacer, en posición prona, supina y decúbito lateral.

## ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES:

- Solo para uso hospitalario.
- No lo coloque cerca del cuello o la cara del bebé ni lo use de ninguna manera que pueda obstruir sus vías respiratorias.
- Se debe tener especial cuidado para evitar colocar todo el peso o demasiados microdiscos encima de los bebés pequeños.
- Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, límpielo de acuerdo con las políticas del hospital.
- Para evitar que los microdiscos se salgan del producto y supongan un peligro para el bebé, y para evitar la entrada de contaminantes en el producto, inspeccione regularmente el tejido que se puede limpiar para detectar cualquier signo visible de daño o desgaste. Deséchelo inmediatamente si el exterior del producto está dañado o comprometido de alguna manera.
- Úselo siempre con una funda.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

- El Mini PAL es un producto limpiable y reutilizable que debe limpiarse con un desinfectante cuaternario hospitalario estándar cada vez que se ensucie y lo use un paciente.
- La funda descartable es de un solo uso y debe desecharse inmediatamente.

Para fundas de tela del Mini PAL (accesorio disponible):

- Lavar a máquina y secar a una temperatura de hasta 71 °C.
- Se recomienda usar blanqueador sin cloro.



## INSTRUCCIONES DE USO:

El Mini PAL es una ayuda de posicionamiento flexible que se puede utilizar de diversas formas para todos los bebés, y se desarrolló específicamente para bebés que pesan menos de 800 g. Cuando se utiliza dentro del XS Dandle<sup>®</sup> ROO2, el Dandle<sup>®</sup> ROO Lite, o el Dandle<sup>®</sup> WRAP Stretch, el Mini PAL rellenará el espacio de la parte inferior de la zona de la bolsa para mejorar la funcionalidad del producto.

- En posición supina, con la cabeza del bebé apoyada en el reposacabezas, coloque la pieza de base más grande ("cuerpo") en el espacio que va desde las nalgas del bebé hasta donde la bolsa se une con la base. Las piernas del bebé deben descansar encima del "cuerpo" en una inclinación pélvica posterior. Utilice las dos piezas simétricas que se extienden desde el "cuerpo" ("piernas") para acurrucarlo junto al torso, debajo de los brazos, rellenando el espacio y ayudando a mantener las caderas y los hombros en flexión. Con el Mini PAL dentro del posicionador, las alas y la bolsa se alinearán correctamente.
- Con el bebé en decúbito lateral, coloque el "cuerpo" detrás del bebé y ponga las "piernas" ligeras sobre los hombros y las caderas del bebé para mantener la posición o proporcionar comodidad.
- Puede utilizarse con bebés más grandes para ayudar a mantener una posición correcta, proporcionar información propioceptiva o sujetar tubos o equipos.
- Si no se dispone de un rollo para la cabeza y la posición de la cabeza en la línea media está justificada, coloque el Mini PAL alrededor de la cabeza del bebé con las "piernas" debajo de los hombros del bebé, apoyando los brazos en flexión.
- Si es necesario extender las extremidades, coloque el "cuerpo" debajo de la articulación y las "piernas" por encima y por debajo de la articulación para mantenerla en extensión.

## ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Comuníquese con Dandle·LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.

