

Mini PAL™ - Avtorkningsbar

Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP-fri.

Dandle·LION®
MEDICAL

AVSEDD ANVÄNDNING:

Ger positioneringsstöd för spädbarn, barn med extremt låg födelsevikt, i mag-, rygg- eller sidoläge.

VARNINGAR/FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för användning på sjukhus.
- Placera inte nära barnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
- Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika att lägga hela vikten eller för många mikroskivor ovanpå små spädbarn.
- Rengör enligt sjukhusets policyer för att förhindra korskontaminering mellan patienter.
- För att förhindra att mikroskivor kommer ut från produkten och utgör en fara för barnet, och för att förhindra inträngning av föroreningar i produkten, kontrollera regelbundet det avtorkningsbra tyget efter synliga tecken på skador eller slitage. Kastaa omedelbart om produktens yttre är skadat eller påverkat på något sätt.
- Använd alltid med överdrag.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

- Dandle PAL är en avtorkningsbar och återanvändbar produkt som ska torkas ren med ett standarddesinfektionsmedel för sjukhus varje gång den blir smutsig och mellan patientanvändningstillfällen.
- Engångsöverdraget är avsett för engångsanvändning och ska kasseras direkt efter användning.

För Mini PAL tygöverdrag (Tillgängligt tillbehör):

- Maskintvätta och torka i temperatur upp till 71°C.
- Klorfritt blekmedel rekommenderas.



BRUKSANVISNING:

Mini PAL är ett flexibelt positioneringshjälpmedel som kan användas på olika sätt för alla spädbarn och har utvecklats för spädbarn < 800 g. När Mini PAL används i XS Dandle® ROO2, Dandle® ROO Lite eller Dandle® WRAP Stretch fyller Mini PAL utrymme längst ner i påsen för att förbättra produktens funktionalitet.

- I rygläge, med barnets huvud upp mot huvudrullen, placera den större basdelen ("kroppen") i utrymme från barnets botten till där påsen möter basen. Barnets ben ska vila ovanpå "kroppen" i en bakre bäckenlutning. Använd de två symmetriska delarna som sticker ut från "kroppen" ("benen") för att krypa upp bredvid bålen, under armarna, fylla upp utrymme och hjälpa till att hålla höfter och axlar i böjning. Med Mini PAL inuti lägesställaren kommer vingarna och påsen att passa in ordentligt.
- Med barnet i sidoläge, placera "kroppen" bakom barnet och lägg de lätta "benen" över barnets axlar och höfter för att behålla sin position eller ge komfort.
- Kan användas med större bebisar för att stödja korrekt positionering, ge proprioceptiv feedback eller stödja slangar/utrustning.
- Om ingen headroll är tillgänglig och mittlinjens huvudpositionering är motiverad, placera Mini PAL runt barnets huvud med "benen" under barnets axlar, stödjande armar i flexion.
- Om lemförlängning är nödvändig, placera "kroppen" under leden och "benen" ovanför och under leden för att hålla den i förlängning.

FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

Kontakta Dandle-LION Medical om du har några frågor eller kommentarer eller för att rapportera eventuella problem med användningen av vår produkt.



Tarry Medical Products
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009

EC REP

Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta

Ver. 2:1124