

# Cozy Cub™

Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP-fri.



## AVSEDD ANVÄNDNING / KLINISK FÖRDEL:

Cozy Cub är ett återanvändbart liggstöd i tre storlekar som kan användas för spädbarn som är inlagda på sjukhus.

## VARNINGAR / FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Placera inte nära spädbarnets ansikte. Använd inte på något sätt som kan hindra luftvägarna.
- Använd alltid med överdrag.
- Se till att öglan i överdragets ände är utom räckhåll för barnets fingrar och tår.
- Endast för sjukhusanvändning.
- Stick INTE nålar i Cozy Cub genom överdraget.
- Särskild försiktighet bör iakttas för att undvika att placera någon del av Cozy Cub ovanpå någon del av spädbarnet.
- Inspektera Cozy Cub regelbundet för eventuella synliga tecken på skador eller slitage såsom snitt, revor, nålstick, upprivna trådar eller fläckar.
- Kassera omedelbart om Cozy Cub har några synliga tecken på fläckar, skador eller slitage.

## RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

- Cozy Cub är avtorkningsbar med ett vanligt kvartärt desinfektionsmedel för sjukhusbruk.
- Engångsöverdraget är avsett för användning med en enda patient och ska kasseras på lämpligt sätt.

För Cozy Cubs tygöverdrag (tillgängligt tillbehör):

- Maskintvätta och torka i temperatur upp till 71°C.
- Klorfritt blekmedel rekommenderas.



## BRUKSANVISNING:

Cozy Cub är ett flexibelt liggstöd som kan användas för spädbarn med många olika medicinska tillstånd. Oavsett kropps läge ska du följa de fem principerna för korrekt kroppsställning (5 Tenets™): flexion, omslutning, i linje med medellinjen, 360 graders proprioception och fri rörlighet under motstånd.

Cozy Cub omsluter spädbarnet samtidigt som du kan se hela barnet. Den kan användas som ett helomslutande stöd eller vikas bort från bebisen för att ge stöd till en mindre del av kroppen. Öglan i överdragets ände kan användas till att skapa ett mindre och mer tättslutande stöd genom att föra motsatt ände genom öglan. De inre silkeslena skivorna kan flyttas runt för att ge mer eller mindre stöd för spädbarnet eller eventuell medicinsk utrustning.

- Ryggläge: Ge stöd runt hela eller delar av spädbarnets kropp. Se till att stödjä axlar, höfter och ben för att uppmuntra till korrekt flexion.
- Sidoläge: Använd Cozy Cub till att förhindra att spädbarnet rullar åt sidan, att hålla händerna mot ansiktet och att ge flexion i de nedre extremiteterna.
- Magläge: Se till att huvud och nacke är i linje med varandra, att bålen har stöd och att höfterna är placerade så att bäckenet är i bakåtroterat läge. Använd Cozy Cub till att hålla spädbarnet i detta flekterande och omslutna läge.
- Perfekt för bebisar vars tillstånd kräver höjd huvudände på sängen.

## FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

Kontakta Dandle•LION Medical om du har några frågor eller kommentarer eller för att rapportera eventuella problem med användningen av vår produkt.



Tarry Medical Products Inc.  
dba DandleLION Medical  
22 Shelter Rock Lane  
Danbury, CT 06810 USA  
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com  
© DandleLION Medical 2009



Advena Medical  
Tower Business Centre  
2nd Floor, Tower Street  
Swatar BKR 4013 Malta

Rev 4:0225