

Cozy Cub™

Realizzato senza utilizzo di lattice in gomma naturale. Non contiene DEHP.



USO PREVISTO / BENEFICI CLINICI:

Il Cozy Cub è un dispositivo di contenimento riutilizzabile, disponibile in tre misure, che può essere utilizzato per i neonati ospedalizzati.

AVVERTENZE / PRECAUZIONI:

- Non posizionare vicino al viso del neonato o utilizzare in modo tale da ostruire le vie respiratorie.
- Utilizzare sempre con un rivestimento.
- Tenere il “passante” all'estremità del rivestimento lontano dalle dita delle mani e dei piedi del neonato.
- Solo per uso ospedaliero.
- NON infilare aghi nel Cozy Cub attraverso il rivestimento.
- Prestare particolare attenzione a non posizionare alcuna parte del Cozy Cub sopra parti del neonato.
- Esaminare periodicamente il Cozy Cub per verificare la presenza di segni visibili di danni o usura come tagli, strappi, spaccature, fori, lacerazioni o macchie.
- Eliminare immediatamente il Cozy Cub se presenta segni visibili di macchie, danni o usura.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

- Cozy Cub è lavabile con un disinfettante ospedaliero standard ai sali quaternari ed è riutilizzabile.
- Il rivestimento monouso è da utilizzare per un solo paziente e deve essere smaltito in modo appropriato.



Per i rivestimenti Cozy Cub in tessuto (accessorio disponibile):

- Lavare in lavatrice e asciugare a una temperatura massima di 71 °C.
- Si consiglia l'uso di candeggina non clorata.



ISTRUZIONI PER L'USO:

Cozy Cub è un ausilio flessibile per il posizionamento adatto a neonati con diverse problematiche mediche. Indipendentemente dalla posizione, seguire i 5 principi per un corretto posizionamento: flessione, contenimento, allineamento della linea mediana, propriocezione a 360° e libertà di movimento e di reazione.

Cozy Cub fornisce contenimento consentendo al contempo la piena osservazione del neonato. Può essere utilizzato come supporto completo o ripiegato per offrire un sostegno parziale al bambino. Il “passante” all'estremità del rivestimento può essere utilizzato per creare un supporto più sicuro e più piccolo, facendo passare l'estremità opposta attraverso il passante. I dischi interni in seta possono essere spostati per offrire più o meno sostegno al bambino o a qualsiasi attrezzatura medica.

- Posizione supina: Per creare un contenimento totale o parziale attorno al neonato. Assicurarsi di sostenere spalle, bacino e gambe per favorire una corretta flessione.
- Posizione laterale: Utilizzare Cozy Cub per evitare che il neonato si rigiri, per mantenere le mani rivolte verso il viso e per favorire la flessione degli arti inferiori.
- Posizione prona: Assicurarsi che testa e collo siano allineati, che il tronco sia sostenuto e che il bacino sia in retroversione. Utilizzare Cozy Cub per mantenere il neonato in questa posizione flessa e contenuta.
- Ideale per i neonati la cui condizione richiede l'elevazione della testata del letto.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Nessun requisito specifico.

Contattare Dandle·LION Medical per eventuali domande o commenti oppure per segnalare qualsiasi problema quando utilizzato.



Rev 4:0325