

Dandle® ROO Lite

Realizzato senza utilizzo di lattice in gomma naturale. Non contiene DEHP. Non contiene BPA.

Dandle•LION[®]
MEDICAL

USO PREVISTO:

Consente il corretto posizionamento dei neonati in posizione prona, supina e laterale. Può essere utilizzato durante la fototerapia del neonato.

AVVERTENZE / PRECAUZIONI:



- Solo per uso ospedaliero.
- Utilizzare su un solo paziente. Prodotto non lavabile in lavatrice.
- Non posizionare le ali o la sacca intorno al collo o al viso del neonato e non utilizzarle in modo tale da ostruire le vie respiratorie del bambino.
- Assicurarsi che il Velcro® sia ben fissato premendolo insieme da entrambi i lati.
Evitare il contatto tra la chiusura in Velcro e la pelle del bambino.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

Il prodotto è destinato all'uso su un solo paziente. Qualsiasi riutilizzo del prodotto su più pazienti non è garantito da Dandle•LION Medical e può essere effettuato solo se la struttura ospedaliera convalida il protocollo di lavaggio e sottopone il prodotto ad un'ispezione visiva dopo ogni lavaggio, per verificare eventuali segni di deterioramento. Eliminare il prodotto se le cuciture non sono integre o se i bordi si presentano sfilacciati.



ISTRUZIONI PER L'USO:

- Scegliere la misura corretta di Dandle ROO Lite considerando peso e corporatura del neonato.
- Se utilizzato in assenza di fototerapia, si consigliano i seguenti accessori Dandle ROO Lite: cuscino multiuso, cuscino in gel con fodera e bordo.
- Se utilizzato durante la fototerapia, seguire le istruzioni sul retro e attenersi alle raccomandazioni del produttore del dispositivo di fototerapia.

IN POSIZIONE PRONA:

1. Posizionare la testa del bambino in modo tale che tocchi la parte superiore del cuscino poggiatesta. Utilizzare il cuscino multiuso, il cuscino in gel ripiegato oppure un altro dispositivo di supporto per sostenere la testa, collo e colonna vertebrale in posizione neutra con ginocchia e fianchi flessi e spalle ruotate in avanti in modo che le braccia cadano naturalmente con le mani vicino al viso.
2. Posizionare l'ala più corta sul corpo, sostenendo la spalla in flessione. Ripetere con l'ala più lunga e fissare il velcro sul lato inferiore della base. Assicurarsi che le ali non siano vicine al viso del bambino.
3. Assicurarsi che i piedi e il bacino siano adeguatamente flessi e che i piedi siano in posizione neutra. Disporre in sicurezza tutti i tubi e le attrezzature mediche. Il cuscino multiuso può essere utilizzato per mantenere gli arti inferiori in posizione con il bacino in retroversione: il cuscino andrà posizionato contro la parte posteriore delle gambe e fissato alla parte inferiore della base con una tensione sufficiente ad aiutare il mantenimento della posizione.
4. Regolare uno o entrambi i lati del supporto per la testa in base alle esigenze, ripiegandolo e fissandolo alla parte inferiore/laterale utilizzando il Velcro. Il bordo può essere utilizzato per sostenere il tubo in posizione neutra. Assicurarsi che il bordo per la testa non ostruisca la respirazione.
5. Se si utilizza la visiera accessoria (non durante la fototerapia) regolarla in modo da bloccare la luce diretta.

IN POSIZIONE SUPINA:

1. Se si utilizza un cuscino in gel, posizionarlo all'interno della base in orizzontale per sostenere testa, collo e scapole oppure verticalmente per sostenere tutta la testa e il tronco.
2. Sistemare il bambino in posizione supina sul cuscino in gel con la testa che tocca il bordo. Il cuscino in gel deve sostenere almeno testa e scapole.
3. Flettere le estremità superiori sulla linea mediana con le mani vicino al viso. Posizionare la fascia più corta sopra le braccia, ruotando le spalle in avanti. Sovrapporre la fascia più lunga, ruotare le spalle e contenere le braccia. Fissare sul lato inferiore. Regolare in base alle esigenze del bambino e alle sue condizioni di salute.

4. Flettere gli arti inferiori del bambino in una posizione intermedia neutra. Posizionare il cuscino multiuso contro i glutei del bambino, sostenendo il bacino in posizione di retroversione. Fissare il cuscino alla parte inferiore della base con una tensione sufficiente a sostenere il bacino.
5. Disporre in modo sicuro le attrezzature mediche.
6. Tirare la sacca verso l'alto sulle gambe e creare una tensione sufficiente per aiutare il bambino a rimanere in posizione flessa. Avvolgere i lati della sacca e fissarli sulla schiena.
7. Se è necessaria una maggiore visualizzazione dell'area ombelicale, piegare la sacca verso il basso e fissarla in un punto qualsiasi lungo i lati.
8. Regolare uno o entrambi i lati del supporto per la testa ripiegandolo e fissandolo alla parte inferiore/laterale con le chiusure in Velcro. Controllare il posizionamento di eventuali tubi e assicurarsi che nulla ostacoli la respirazione del bambino.
9. Se si utilizza la visiera accessoria, regolarla in modo da bloccare la luce diretta.

IN POSIZIONE LATERALE:

1. Se si utilizza il cuscino in gel, posizionarlo all'interno della base in senso orizzontale o verticalmente a seconda delle dimensioni e delle esigenze del bambino.
2. Sistemare il bambino in posizione laterale sul cuscino in gel con la testa appoggiata al bordo superiore.
3. Assicurarsi che le spalle siano rivolte in avanti e che gambe e bacino siano fissati, senza stringere troppo.
4. Posizionare l'ala più lunga sulle spalle per mantenere la flessione e una buona postura. Fissare alla parte inferiore della base in Velcro.
5. Piegare le linguette del cuscino multiuso sul corpo del cuscino in modo tale che la pelle del bambino non tocchi le chiusure. Utilizzare il cuscino dietro la schiena come sostegno per il corpo o in base alle esigenze.
6. Tirare su la sacca mantenendo le gambe leggermente flesse. Assicurarsi che l'estremità inferiore della sacca sia utilizzabile per un supporto dei piedi. Fissare alla parte inferiore della base in Velcro.
7. Regolare uno o entrambi i lati del supporto per la testa ripiegandolo e fissandolo alla parte inferiore/laterale con le chiusure in velcro. Controllare il posizionamento di eventuali tubi e assicurarsi che nulla ostacoli la respirazione del bambino.
8. Se si utilizza la visiera accessoria, regolarla in modo da bloccare la luce diretta.

FOTOTERAPIA:

1. Seguire le linee guida dei produttori di apparecchiature per fototerapia.
2. Se si utilizza Dandle ROO Lite durante il trattamento di fototerapia, si ricordi che gli strati di materiale riducono l'effetto della luce. I test hanno dimostrato che uno strato di cotone (la sacca o un'ala, non sovrapposte) lascia passare fino a circa il 74% delle radiazioni luminose della fototerapia; due strati di cotone (la sacca più un'ala o due ali) lasciano passare fino a circa il 54% delle radiazioni luminose della fototerapia, mentre tre strati di cotone (la sacca più entrambe le ali) lasciano passare fino a circa il 44% delle radiazioni luminose della fototerapia.
3. Misurare le radiazioni in conformità con i protocolli ospedalieri per garantire che il bambino riceva una fototerapia adeguata.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Nessun requisito specifico.

Contattare Dandle•LION Medical per eventuali domande o commenti
oppure per segnalare qualsiasi problema dovuto all'utilizzo del prodotto.

