

Dandle® ROO Lite

Sin látex de caucho natural. Sin DEHP. Sin BPA.



USO PREVISTO:

Permite posicionar correctamente a los bebés en posición prona, supina y lateral. Se puede utilizar mientras el bebé recibe fototerapia.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES: ⚠

- Solo para uso hospitalario.
- **Uso en un solo paciente. El producto no está diseñado para lavarse a máquina.**
- **No coloque las alas o la bolsa alrededor del cuello o la cara del bebé ni las use de ninguna manera que pueda obstruir las vías respiratorias del bebé.**
- **Asegúrese de que el Velcro® esté bien sujetado presionándolo por ambos lados. Evite el contacto entre el gancho de velcro y la piel del bebé.**

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

El producto está diseñado para su uso en un solo paciente. Dandle•LION Medical no avala la reutilización de productos entre pacientes, por lo que solo deberá efectuarse si el hospital valida el protocolo de lavado y se inspecciona visualmente el producto después de cada lavado para detectar signos de deterioro. Deséchelo si las costuras no están intactas o si los bordes están deshilachados.



INSTRUCCIONES DE USO:

- Seleccione el Dandle ROO Lite del tamaño correcto según el peso y las proporciones corporales del bebé.
- Si se utiliza sin fototerapia, se recomiendan los accesorios de Dandle ROO Lite: rollo multiuso, almohada de gel con funda y borde.
- Si se utiliza durante la fototerapia, siga las instrucciones del reverso y cumpla con las recomendaciones del fabricante de la unidad de fototerapia.

POSICIÓN PRONA:

1. Coloque la cabeza del bebé de forma que toque la parte superior del reposacabezas. Utilice un rollo multiuso, una almohada de gel doblada u otro dispositivo de apoyo como follo prono para apoyar la cabeza, el cuello, y la columna vertebral en una alineación neutra con las rodillas y las caderas flexionadas y los hombros curvados hacia adelante, de modo que los brazos caigan naturalmente con las manos cerca de la cara.
2. Lleve el ala más corta por el cuerpo, apoyando el hombro en flexión. Repita con el ala más larga y fije el velcro a la parte inferior de la base. Asegúrese de que las alas no estén cerca de la cara del bebé.
3. Asegúrese de que los pies y las caderas estén correctamente flexionados y que los pies estén en una alineación neutra. Coloque de forma segura todos los tubos y el equipo médico. El rollo multiuso puede utilizarse para ayudar a mantener las extremidades inferiores en una inclinación pélvica posterior colocando el rollo contra la parte posterior de los muslos y fijándolo a la parte inferior de la base con suficiente tensión para ayudar a mantener la posición.
4. Ajuste uno o ambos lados del límite de la cabeza, según sea necesario, doblándolo y fijándolo a la parte inferior/lateral de la base con velcro. El límite puede utilizarse para sostener los tubos en posición neutral. Asegúrese de que el límite de la cabeza no esté causando ninguna obstrucción respiratoria.
5. Si se utiliza el borde (no durante la fototerapia), ajústelo para bloquear la luz directa.

POSICIÓN SUPINA:

1. Si se utiliza una almohada de gel, colóquela dentro de la base en orientación horizontal para apoyar la cabeza, el cuello y la escápula o en orientación vertical para apoyar toda la cabeza y el tronco.
2. Coloque al bebé en posición supina sobre la almohada de gel, de modo que la cabeza del bebé toque el límite. La almohada de gel debe sostener al menos la cabeza y la escápula.
3. Flexione las extremidades superiores a una línea media con las manos cerca de la cara. Tire de la funda más corta sobre los brazos, curvando los hombros hacia adelante. Tire de la funda más larga por encima, curvando los hombros y conteniendo los brazos. Fijela a la parte inferior. Ajústela según las necesidades y el estado médico del bebé.

4. Flexione las extremidades inferiores del bebé hasta llegar a una posición neutra en la línea media. Coloque el rollo multiuso contra las nalgas del bebé, sosteniendo la pelvis en una inclinación posterior. Fije el rollo a la parte inferior de la base con suficiente tensión para sostener las caderas y la pelvis.
5. Coloque el equipo médico de forma segura.
6. Pase la bolsa por encima de las piernas y ejerza suficiente tensión para ayudar al bebé a permanecer en posición flexionada. Envuelva con los lados de la bolsa y abroche en la espalda.
7. Si se necesita más visualización del área umbilical, doble la bolsa hacia abajo y fijela en cualquier parte de los lados.
8. Ajuste uno o ambos lados del límite de la cabeza doblándolos por encima y fijándolos a la parte inferior/lateral con sujetadores de velcro. Compruebe la ubicación de las líneas o tubos y asegúrese de que no haya obstrucciones para la respiración del bebé.
9. Si se utiliza el borde, ajústelo para bloquear la luz directa.

POSICIÓN LATERAL:

1. Si se utiliza una almohada de gel, colóquela dentro de la base en posición horizontal o vertical, según el tamaño y las necesidades del bebé.
2. Coloque al bebé en posición lateral sobre la almohada de gel, de modo que su cabeza se apoye en el límite superior.
3. Asegúrese de que ambos hombros estén curvados hacia adelante y que las piernas y las caderas estén ligeramente flexionadas.
4. Pase el ala más larga sobre los hombros para ayudar a mantener la flexión y la buena postura. Sujétela a la parte inferior de la base con velcro.
5. Doble las lengüetas del rollo multiuso hacia el cuerpo del rollo para que la piel del bebé no toque los sujetadores. Utilice el rollo detrás de la espalda, como almohada para el cuerpo o según sea necesario.
6. Suba la bolsa, manteniendo las piernas ligeramente flexionadas. Asegúrese de que el extremo inferior de la bolsa esté disponible para apoyar los pies. Sujétela a la parte inferior de la base con velcro.
7. Ajuste uno o ambos lados del límite de la cabeza doblándolos por encima y fijándolos a la parte inferior/lateral con sujetadores de velcro. Compruebe la ubicación de las líneas o tubos y asegúrese de que no haya obstrucciones para la respiración del bebé.
8. Si se utiliza el borde, ajústelo para bloquear la luz directa.

FOTOTERAPIA:

1. Siga todas las pautas de los fabricantes sobre los equipos de fototerapia.
2. Si se utiliza Dandle ROO Lite durante el tratamiento de fototerapia, tenga en cuenta que las capas de material reducirán la eficacia de la luz. Las pruebas han demostrado que una capa de algodón (la bolsa o un ala, sin superponerlas) permite que pase hasta aproximadamente el 74 % de la irradiación de la luz de fototerapia; dos capas de algodón (la bolsa más un ala, o dos alas) permiten que pase hasta aproximadamente el 54 % de la irradiación de la luz de fototerapia de la irradiación de la luz de fototerapia, y tres capas de algodón (la bolsa más ambas alas) permiten que pase hasta aproximadamente el 44 % de la irradiación de la luz de fototerapia.
3. Mida la irradiancia de acuerdo con los protocolos del hospital para garantizar que el bebé recibe una fototerapia adecuada.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Comuníquese con Dandle·LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.

