

Dandle[®] WRAP Stretch

Realizzato senza utilizzo di lattice in gomma naturale. Non contiene DEHP. Non contiene BPA.

USO PREVISTO / BENEFICI CLINICI:

Dandle WRAP Stretch è un dispositivo di posizionamento riutilizzabile che può essere adoperato in ospedale con i neonati per fornire supporto allo sviluppo neurologico mentre il bambino dorme, mangia, viene lavato o tenuto in braccio. Può anche essere utilizzato per fornire supporto durante le procedure mediche oppure mentre il bambino viene sottoposto a trattamenti. Dandle WRAP fornisce un supporto aggiuntivo per i neonati prematuri e con tono muscolare basso, nel rispetto delle linee guida "Back to Sleep."

AVVERTENZE / PRECAUZIONI:

- Solo per uso ospedaliero.
- Non posizionare le ali o la sacca intorno al collo o al viso del neonato e non utilizzarle in modo tale da ostacolare la respirazione del bambino.
- Tra un paziente e l'altro, pulire secondo le procedure ospedaliere.
- Monitorare la temperatura del neonato per evitare un'ipertermia.
- Assicurarsi che il Velcro[®] sia ben fissato premendolo insieme da entrambi i lati. Evitare il contatto tra la chiusura in Velcro e la pelle del bambino.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

- Lavare in lavatrice ad una temperatura massima di 71°C. Utilizzare solo candeggina non clorata. Il prodotto durerà più a lungo se tutte le chiusure in velcro sono ben fissate durante il lavaggio. Mettere in asciugatrice a media temperatura.



ISTRUZIONI PER L'USO:

Scegliere la misura corretta di Dandle WRAP in base al peso e alla corporatura del neonato.

1. Posizionare Dandle WRAP su una superficie d'appoggio stabile con le ali ai lati e la sacca aperta sul fondo. Il Velcro dovrebbe trovarsi all'esterno del lato posteriore.
2. Posizionare il bambino in posizione supina su WRAP con la parte superiore delle spalle allineata proprio sotto il bordo superiore di WRAP.
3. Flettere le estremità superiori sulla linea mediana con le mani vicino al viso. Posizionare la fascia più corta sulla spalla e sulle braccia, facendo in modo che le spalle ruotino in avanti. Sovrapporre la fascia più lunga, ruotare le spalle e contenere le braccia in modo confortevole per il bambino. Fissare al quadrato in velcro sul retro del posizionatore. Regolare in base alle esigenze del bambino e alle sue condizioni di salute.
4. Flettere gli arti inferiori del bambino in una posizione intermedia neutra, supportando il bacino in retroversione.
5. Disporre in sicurezza eventuali tubi e attrezzature mediche in modo tale che possano uscire lateralmente.
6. Tirare la sacca sopra le gambe e i piedi. Fissarla alla schiena. Regolare in base alle esigenze del bambino e alle sue condizioni di salute.
7. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi posizione (prona, supina, o laterale) sotto supervisione medica.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Nessun requisito specifico.

LINEE GUIDA "BACK TO SLEEP" per l'uso di Dandle WRAP Stretch:

Seguire tutte le istruzioni tranne:

- a. Punto 3: Assicurarsi che WRAP non si allenti intorno al viso del bambino, fissandolo bene con le chiusure o posizionando la fascia più corta sotto le ascelle del bambino anziché sulle spalle per garantire che il bambino non si rannicchi al suo interno.
- b. Punto 7: Il bambino dovrebbe sempre essere messo a dormire in posizione supina, dunque, sulla schiena.

Contattare Dandle•LION Medical per eventuali domande o commenti oppure per segnalare qualsiasi problema quando utilizzato.



Rev 6:0325