

# Dandle<sup>®</sup> ROO2

## ZWECKBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:

Das Dandle ROO2 ist ein wiederverwendbares Stützensystem zur Förderung der neuronalen Entwicklung, das für hospitalisierte Frühgeborene und kranke Säuglinge in Bauch-, Rücken- oder Seitenlage verwendet werden kann. Das Dandle ROO2 wird mit einer Grundeinheit geliefert, an dem eine Kopfrolle, ein Fußsack sowie eine Mehrzweckrolle mit Velcro®(Klettverschluss)-Laschen angebracht sind. Weiteres Zubehör umfasst einen abnehmbaren Schirm und ein Gelkissen mit Baumwollbezug. Eine bebilderte Anleitung ist online verfügbar unter [www.dandleLIONmedical.com](http://www.dandleLIONmedical.com).

## WARNHINWEISE / KONTRAINDIKATIONEN:

- Nur für den Krankenhausgebrauch.
- Die Flügelbänder oder den Fußsack nicht um den Hals oder das Gesicht des Säuglings platzieren oder auf eine Weise verwenden, welche die Atemwege des Säuglings einengen könnten.
- Die Stoffteile vor der Verwendung durch andere Patienten waschen.
- Zur Vermeidung einer zu starken Erwärmung, die Temperatur des Säuglings überwachen.
- Sicherstellen, dass die Klettverschlüsse fest angebracht sind, indem sie von beiden Seiten aneinander gedrückt werden. Kontakt zwischen dem Klettverschluss und der Haut des Säuglings vermeiden.

## REINIGUNGSHINWEISE:

Alle Stoffteile bei einer Temperatur von bis zu 71°C in der Maschine waschen und trocknen. Hohe Temperaturen verursachen ein zusätzliches Einlaufen. Das Produkt nach jeder Wäsche einer Sichtprüfung unterziehen. Das ROO2 ist langlebiger, wenn beim Waschen alle Klettverschlüsse angebracht sind.



## GEBRAUCHSHINWEISE:

Wählen Sie die ordnungsgemäße Größe des Dandle ROO2 entsprechend dem Gewicht und den Körperproportionen des Säuglings.

### BAUCLAGE:

1. Bei Verwendung eines Gelkissen-Zubehörs, legen Sie es entweder vertikal in die Grundeinheit zum Abstützen des Kopfs und Rumpfs oder horizontal, bei dem das Kissen den Kopf und den Hals des Säuglings stützt.
2. Platzieren Sie den Säuglingskopf so, dass er die Oberseite der Kopfrolle berührt. Vergewissern Sie sich, dass der Kopf und Rumpf abgestützt werden, so dass der Kopf und die Wirbelsäule neutral ausgerichtet, die Knie und Hüften gebeugt und die Schultern nach vorne abgerundet sind, so dass die Arme sich in natürlicher Position mit den Händen nahe am Gesicht befinden.
3. Legen Sie das kürzere Flügelband über die Arme. Legen Sie das längere Flügelband über das kürzere Flügelband und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss an der Unterseite. Je nach Erfordernissen und Gesundheitszustand des Säuglings anpassen.
4. Beugen Sie die unteren Extremitäten des Säuglings in eine neutrale Mittellinienhaltung. Falls gewünscht, platzieren Sie die Mehrzweckrolle gegen das Gesäß des Säuglings und stützen Sie das Becken mit einer posterioren Beckenkipfung, als ob der Säugling in einer Schaukel säße. Befestigen Sie die Rolle mit ausreichender Spannung an der Unterseite der Grundeinheit, um Hüften und Becken zu stützen.
5. Ordnen Sie die medizinische Ausrüstung sicher um die Lagerungshilfe an.
6. Halten Sie die Beine des Säuglings gebeugt, ziehen Sie den Fußsack um den Säugling nach oben und befestigen Sie zuerst den mittleren Klettstreifen am mittleren, quadratischen Klettbandverschluss und dann die Seitenstreifen am Klettbandverschluss an der Rückseite.
7. Passen Sie eine oder beide Seiten der Kopfbegrenzung an, indem Sie sie umklappen und mit den sicher positioniert ist und die Atemwege nicht blockiert werden.
8. Bei Verwendung des Schirm-Zubehörteils, richten Sie es so aus, dass eine direkte Lichteinstrahlung blockiert wird.

### RÜCKENLAGE:

1. Bei Verwendung des Gelkissen-Zubehörs, legen Sie es entweder zum Abstützen des Kopfs und Rumpfs vertikal in die Grundeinheit oder horizontal, um mit dem Kissen den Kopf und Hals des Säuglings in ordnungsgemäßer Ausrichtung zum Körper zu stützen.

2. Platzieren Sie den Säugling in Rückenlage in der Lagerungsvorrichtung, wobei der Kopf des Säuglings die Oberseite der Kopfrolle berührt.
3. Bringen Sie die oberen Extremitäten in die mittellinienorientierte Beugeposition mit den Händen nahe am Gesicht. Legen Sie das kürzere Flügelband über die Arme, so dass die Schultern nach vorne gerundet sind. Legen Sie das längere Flügelband über das kürzere Flügelband und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss an der Unterseite. Je nach Erfordernissen und Gesundheitszustand des Säuglings anpassen.
4. Beugen Sie die unteren Extremitäten des Säuglings in eine neutrale Mittellinienhaltung. Platzieren Sie die Mehrzweckrolle gegen das Gesäß des Säuglings und stützen Sie das Becken mit einer posterioren Beckenkipfung, als ob der Säugling in einer Schaukel säße. Befestigen Sie die Rolle mit ausreichender Spannung an der Unterseite der Grundeinheit, um Hüften und Becken zu stützen.
5. Ordnen Sie die medizinische Ausrüstung sicher um die Lagerungsvorrichtung an.
6. Halten Sie die Beine des Säuglings gebeugt, ziehen Sie den Fußsack um den Säugling nach oben und befestigen Sie zuerst den mittleren Klettstreifen am mittleren, quadratischen Klettbandverschluss und dann die Seitenstreifen am Klettbandverschluss an der Rückseite Hinweis: Falls eine bessere Sicht auf den Nabelbereich erforderlich ist, kann der Fußsack nach unten umgeklappt und an einer beliebigen Stelle an den Seiten befestigt werden.
7. Passen Sie eine oder beide Seiten der Kopfbegrenzung an, indem Sie sie umklappen und mit den Klettverschlüssen befestigen. Vergewissern Sie sich, dass das Atemgerät ordnungsgemäß und sicher positioniert ist und die Atemwege nicht blockiert werden.
8. Bei Verwendung des Schirm-Zubehörteils, richten Sie es so aus, dass eine direkte Lichteinstrahlung blockiert wird.

#### SEITENLAGE:

1. Bei Verwendung eines Gekissens, platzieren Sie es je nach Größe und Erfordernissen des Säuglings entweder horizontal oder vertikal in der Grundeinheit.
2. Legen Sie den Säugling in Seitenlage auf das Gekissen, wobei der Säuglingskopf an der oberen Begrenzung anliegt.
3. Vergewissern Sie sich, dass beide Schultern nach vorne gerundet und Beine und Hüften locker gebeugt sind.
4. Falten Sie die Laschen der Mehrzweckrolle an des Rollenteil, so dass die Haut des Säuglings nicht mit den Befestigungselementen in Kontakt kommt. Verwenden Sie die Rolle am Rücken, als Seitenschläferkissen, oder je nach Bedarf.
5. Legen Sie das längere Flügelband über die Schultern, um die Beugung zu fixieren und eine gute Körperhaltung zu fördern. Befestigen Sie es mit dem Klettverschluss an der Unterseite der Grundeinheit.
6. Ziehen Sie den Fußsack hoch und halten Sie die Beine locker gebeugt. Achten Sie darauf, dass das untere Ende des Fußsacks der Fußverankerung dient. Befestigen Sie ihn mit einem Klettverschluss an der Unterseite der Basis.
7. Passen Sie eine oder beide Seiten der Kopfbegrenzung an, indem Sie sie umklappen und sie mit den Klettverschlüssen am Boden/Seiten befestigen. Überprüfen Sie die Platzierung von Kabeln und Schläuchen und stellen Sie sicher, dass die Atmung des Säuglings nicht beeinträchtigt wird.
8. Bei Verwendung des Schirm-Zubehörteils, richten Sie es so aus, dass eine direkte Lichteinstrahlung blockiert wird.

#### LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

*DEHP- und BPA-frei, nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.*

Bitte wenden Sie sich an Dandle•LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.

