

Dandle[®] ROO2

USO PREVISTO / BENEFICI CLINICI:

Dandle ROO2 è un sistema riutilizzabile di supporto allo sviluppo neurologico che può essere utilizzato per il posizionamento prono, supino e laterale di neonati prematuri e con patologie ospedalizzati. Dandle ROO2 è dotato di un'unità di base con un cuscino poggiatesta e sacca integrati e un cuscino multiuso con linguette in Velcro[®]. Sono disponibili come accessori aggiuntivi una visiera amovibile e un cuscino in gel con rivestimento in cotone. Istruzioni illustrate sono disponibili online alla pagina www.dandleLIONmedical.com.

AVVERTENZE/CONTROINDICAZIONI:

- Solo per uso ospedaliero.
- Non posizionare le ali o la sacca intorno al collo o al viso del neonato e non utilizzarle in modo tale da ostruire le vie respiratorie del bambino.
- Tra un paziente e l'altro, lavare i componenti in tessuto
- Monitorare la temperatura del neonato per evitare un'ipertermia.
- Assicurarsi che le chiusure in Velcro siano ben fissate premendole insieme da entrambi i lati. Evitare il contatto tra la chiusura in Velcro e la pelle del bambino.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

Lavare e asciugare in lavatrice tutti gli elementi in tessuto a una temperatura massima di 71 °C. Temperature più elevate potrebbero provocare un ulteriore restringimento del tessuto. Esaminare visivamente il prodotto dopo ogni lavaggio. ROO2 durerà più a lungo se tutte le chiusure in velcro risultano ben fissate durante il lavaggio.



ISTRUZIONI PER L'USO:

Scegliere la misura corretta di Dandle ROO2 in base al peso e alla corporatura del neonato.

IN POSIZIONE PRONA:

1. Se si utilizza il cuscino in gel, posizionarlo all'interno della base in posizione verticale per sostenere testa e busto, oppure in posizione orizzontale con il cuscino per sostenere testa e collo del bambino.
2. Posizionare la testa del bambino in modo tale che tocchi la parte superiore del cuscino poggiatesta. Assicurarsi che testa e busto siano sostenuti in modo tale che la testa e la colonna vertebrale si trovino in posizione neutra, ginocchia e bacino siano flessi e le spalle siano ruotate in avanti in modo che le braccia cadano naturalmente e le mani siano vicine al viso.
3. Posizionare l'ala più corta sopra le braccia. Stendere l'ala più lunga sopra l'ala più corta e fissarla al velcro sul lato inferiore. Regolare in base alle esigenze del bambino e alle sue condizioni di salute.
4. Flettere gli arti inferiori del bambino in una posizione intermedia neutra. Se lo si desidera, posizionare il cuscino multiuso contro i glutei del bambino, sostenendo il bacino in retroversione come se il bambino fosse seduto su di un'altalena. Fissare il cuscino alla parte inferiore della base con una tensione sufficiente a sostenere il bacino.
5. Disporre in modo sicuro le attrezzature mediche intorno al dispositivo di posizionamento.
6. Mantenendo le gambe del bambino flesse, sistemare la sacca intorno al bambino e fissare prima la striscia centrale in velcro al quadrato centrale in velcro, poi le strisce laterali al velcro sul retro.
7. Regolare uno o entrambi i lati del supporto per la testa ripiegandolo e fissandolo con le chiusure in velcro. Assicurarsi che l'apparecchiatura respiratoria sia posizionata correttamente e in modo sicuro e che le vie aeree siano libere.
8. Se si utilizza la visiera accessoria, regolarla in modo da bloccare la luce diretta.

IN POSIZIONE SUPINA:

1. Se si utilizza il cuscino in gel, posizionarlo all'interno della base in posizione verticale per sostenere testa e busto, oppure in posizione orizzontale con il cuscino per sostenere testa e collo del bambino in modo tale che siano correttamente allineati con il corpo.
2. Sistemare il bambino in posizione supina nel posizionatore con la testa che tocca la parte superiore del cuscino poggiatesta.
3. Flettere le estremità superiori sulla linea mediana con le mani vicino al viso. Posizionare l'ala più corta sopra le braccia, ruotando le spalle in avanti. Stendere l'ala più lunga sopra l'ala più corta e fissarla al velcro sul lato inferiore. Regolare in base alle esigenze del bambino e alle sue condizioni di salute.
4. Flettere gli arti inferiori del bambino in una posizione intermedia neutra. Posizionare il cuscino multiuso contro i glutei del bambino, sostenendo il bacino in retroversione come se il bambino fosse seduto su di un'altalena. Fissare il cuscino alla parte inferiore della base con una tensione sufficiente a sostenere il bacino.
5. Disporre in modo sicuro le attrezzature mediche intorno al dispositivo di posizionamento.
6. Mantenendo le gambe del bambino flesse, sistemare la sacca intorno al bambino e fissare prima la striscia centrale in velcro al quadrato centrale in velcro, poi le strisce laterali al velcro sul retro.
Nota: Se è necessario visualizzare meglio l'area ombelicale, la sacca può essere ripiegata e fissata in qualsiasi punto lungo i lati.
7. Regolare uno o entrambi i lati del supporto per la testa ripiegandolo e fissandolo con le chiusure in velcro. Assicurarsi che l'apparecchiatura respiratoria sia posizionata correttamente e in modo sicuro e che le vie aeree siano libere.
8. Se si utilizza la visiera accessoria, regolarla in modo da bloccare la luce diretta.

IN POSIZIONE LATERALE:

1. Se si utilizza il cuscino in gel, posizionarlo all'interno della base in senso orizzontale o verticalmente a seconda delle dimensioni e delle esigenze del bambino.
2. Sistemare il bambino in posizione laterale sul cuscino in gel con la testa appoggiata al bordo superiore.
3. Assicurarsi che le spalle siano rivolte in avanti e che gambe e bacino siano leggermente flessi.
4. Piegare le linguette del cuscino multiuso sul corpo del cuscino in modo tale che la pelle del bambino non tocchi le chiusure. Utilizzare il cuscino dietro la schiena come sostegno per il corpo oppure in base alle esigenze.
5. Posizionare l'ala più lunga sulle spalle per mantenere la flessione e una buona postura. Fissare alla parte inferiore della base in Velcro.
6. Tirare su la sacca mantenendo le gambe leggermente flesse. Assicurarsi che l'estremità inferiore della sacca sia utilizzabile per un supporto dei piedi. Fissare alla parte inferiore della base in Velcro.
7. Regolare uno o entrambi i lati del supporto per la testa ripiegandolo e fissandolo alla parte inferiore/laterale con le chiusure in Velcro. Controllare il posizionamento di eventuali tubi e assicurarsi che nulla ostacoli la respirazione del bambino.
8. Se si utilizza la visiera accessoria, regolarla in modo da bloccare la luce diretta.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Nessun requisito specifico.

Non contiene DEHP, non contiene BPA, realizzato senza utilizzo di lattice in gomma naturale

Contattare Dandle•LION Medical per eventuali domande o commenti
oppure per segnalare qualsiasi problema quando utilizzato.



Tarry Medical Products Inc.
dba Dandle•LION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2021



Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta

Rev8:0325