

Snuggly ROO™



Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. Sans DEHP ni BPA.

UTILISATION PRÉVUE / AVANTAGE CLINIQUE:

Le Snuggly ROO est un accessoire d'aide au positionnement qui contribue au développement neurologique et peut être utilisé pour les nourrissons prématurés et malades hospitalisés, en position de décubitus ventral, dorsal ou latéral.

AVERTISSEMENTS / ATTENTION:

- **Destiné uniquement à un usage hospitalier.**
- **Évitez de placer les bandes autour du cou ou du visage du bébé ou d'en faire un usage qui pourrait obstruer ses voies respiratoires.**

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

Lavez et séchez en machine tous les composants du linge à des températures pouvant atteindre 71°C. Des températures plus élevées peuvent entraîner un nouveau rétrécissement. Inspectez visuellement le produit après chaque lavage.



MODE D'EMPLOI:

- Choisissez les produits Snuggly ROO dans la taille adaptée au poids et à la taille du nourrisson. Consultez l'étiquette pour les recommandations sur la taille en fonction du poids.
- Mettez le Snuggly ROO dans l'incubateur, la couveuse, ou le lit du nourrisson. Placez la paroi destinée à soutenir les pieds au fond du lit et les bandes sur les côtés.
- Placez le bébé dans le Snuggly ROO en position de décubitus ventral, dorsal ou latéral de sorte que ses jambes soient correctement fléchies et glissées à l'intérieur de la paroi destinée à soutenir les pieds, et que sa tête et sa colonne vertébrale soient en alignement neutre.
- Placez les mains du bébé près de son visage en position fléchie.
- Faites passer une bande par-dessus l'épaule et le bras du bébé afin de maintenir ses mains dans une position confortable et fléchie près de son visage.
- Rentrez la bande sous le Snuggly ROO afin que le poids du bébé la maintienne en place.
- Faites passer la bande du côté opposé par-dessus l'autre épaule et l'autre bras pour maintenir une flexion appropriée et rentrez-la sous l'accessoire. Si le bébé est couché en position de décubitus latéral, vous n'aurez peut-être pas besoin de la deuxième bande.
- Pour maintenir le bébé dans la position souhaitée, la personne chargée des soins peut utiliser un Polly PAL™, Dandle® PAL, ou Cozy Cub™ pour soutenir la tête du bébé et empêchez-le de sortir les jambes de la paroi soutenant les pieds.
- Vérifiez tous les conduits et tubes après avoir positionné le bébé pour vous assurer que le placement est correct et sûr.

REMARQUE: Pour une meilleure visualisation du bébé, les bandes peuvent être placées sur les côtés.

RANGEMENT ET MISE AU REBUT:

Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou si vous souhaitez signaler un problème relatif à l'utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle•LION Medical.

