

Snuggly ROO™



Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. DEHP- und BPA-frei.

ZWECHBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:

Das Snuggly ROO ist eine Lagerungshilfe zur Förderung der neuronalen Entwicklung, das für hospitalisierte Frühgeborene und kranke Säuglinge in Bauch-, Rücken- oder Seitenlage verwendet werden kann.

WARNHINWEISE / VORSICHTSMASSNAHMEN:

- **Nur für den Krankenhausgebrauch.**
- **Die Bänder nicht um den Hals oder das Gesicht des Säuglings legen oder auf eine Weise verwenden, welche die Atemwege des Säuglings einengen könnten.**

REINIGUNGSHINWEISE:

Alle Stoffteile bei einer Temperatur von bis zu 71°C in der Maschine waschen und trocknen. Höhere Temperaturen verursachen ein zusätzliches Einlaufen. Das Produkt nach jeder Wäsche visuell prüfen.



GEBRAUCHSHINWEISE:

- Wählen Sie die ordnungsgemäße Größe des Snuggly ROO entsprechend dem Gewicht und den Körperproportionen des Säuglings. Siehe Etikett für Größenempfehlungen nach Gewicht.
- Legen Sie das Snuggly ROO in den Inkubator, auf die Wärmedecke oder das Kinderbett mit der Fußrolle am unteren Ende des Babyneests sowie den Bändern seitlich angeordnet.
- Legen Sie den Säugling in Bauch-, Rücken- oder Seitenlage in das Snuggly ROO, so dass die Beine des Säuglings entsprechend an der Fußrolle gebeugt und Kopf und Wirbelsäule neutral ausgerichtet sind.
- Platzieren Sie die Hände des Säuglings in einer gebeugten Position nahe am Gesicht.
- Legen Sie ein Band über Schulter und Arm des Säuglings, um die Hände des Säuglings in einer bequemen, gebeugten Position nahe am Gesicht zu halten.
- Klemmen Sie das Band unter das Snuggly ROO, damit das Gewicht des Säuglings es in Position hält.
- Legen Sie das Band auf der gegenüberliegenden Seite über die andere Schulter und Arm, um die ordnungsgemäße Beugung beizubehalten und klemmen Sie es unter das Produkt. In Seitenlage wird das zweite Band möglicherweise nicht benötigt.
- Zue Beibehaltung der gewünschten Position, kann die Pflegeperson zum Abstützen des Säuglingskopfes sowie zur Verhinderung des Freistrampelns der Füße von der Fußrolle ein Polly PAL™, Dandle® PAL, oder Cozy Cub™ verwenden.
- Überprüfen Sie alle Kabel und Schläuche nach der Lagerung des Säuglings, um eine korrekte und sichere Platzierung zu gewährleisten.

HINWEIS: Die Bänder können seitlich angeordnet werden, falls eine bessere Sicht auf den Säugling erforderlich ist.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

Bitte wenden Sie sich an Dandle·LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.



Rev 2:0325