

Snuggly ROO™

Libre de látex. Libre de DEHP y BPA.



USO PREVISTO / BENEFICIO CLÍNICO:

Snuggly ROO es una ayuda de posicionamiento en pos del desarrollo neurológico que se puede utilizar en bebés prematuros y enfermos hospitalizados en posición prona, supina, o lateral.

ADVERTENCIAS / CONTRAINDICACIONES:

- Solo para uso hospitalario.
- No coloque correas alrededor del cuello o la cara del bebé ni las use de ninguna manera que pueda obstruir sus vías respiratorias.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Lave y seque a máquina todos los componentes de tela a temperaturas de hasta 71°C. Las temperaturas más altas causarán más encogimiento. Inspeccione visualmente el producto después de cada lavado.



INSTRUCCIONES DE USO:

- Seleccione el Snuggly ROO del tamaño correcto según el peso y las proporciones corporales del bebé. Consulte la etiqueta para conocer las recomendaciones de tamaño por peso.
- Coloque el Snuggly ROO en la incubadora, calentador o cuna con el reposapiés al pie de la cama y las correas a los lados.
- Coloque al bebé en el Snuggly ROO en posición prona, supina o lateral para que las piernas del bebé estén flexionadas de manera adecuada contra el reposapiés, y la cabeza y la columna estén en alineación neutra.
- Coloque las manos del bebé cerca de la cara en una posición flexionada.
- Pase una correa sobre el hombro y el brazo del bebé para ayudar a sostener las manos del bebé en una posición cómoda y flexionada cerca de su cara.
- Meta la correa debajo del Snuggly ROO para que el peso del bebé la mantenga en su lugar.
- Tire de la correa del lado opuesto sobre el otro hombro y brazo para ayudar a mantener la flexión y el pliegue adecuados. En posición lateral, es posible que no se necesite la segunda correa.
- Para mantener la posición deseada, el cuidador puede usar un Polly PAL™, Dandle® PAL, o Cozy Cub™ para dar apoyo al bebé en la cabeza y evitar que el bebé se salga pateando el reposapiés.
- Revise todas las líneas y tubos después de colocar al bebé para asegurar una colocación adecuada y segura.

NOTA: Si se necesita una mayor visualización del bebé, las correas se pueden colocar a un lado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.

