

Snuggly ROO™ jetable

Ne contient pas de caoutchouc naturel. Sans DEHP ni BPA.

UTILISATION PRÉVUE / AVANTAGE CLINIQUE:

Le Snuggly ROO jetable est un accessoire d'aide au positionnement qui participe au développement neurologique et peut être utilisé pour les nourrissons prématurés et malades hospitalisés, en position couchée sur le ventre, sur le dos ou sur le côté.

AVERTISSEMENTS / ATTENTION:

- **Destiné uniquement à un usage hospitalier.**
- **Évitez de placer les bandes près du cou ou du visage du bébé ou d'en faire un usage qui pourrait obstruer ses voies respiratoires.**
- **Accessoire à patient unique.**



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

Mettez le produit au rebut de façon appropriée lorsqu'il est sale ou a été utilisé par un patient. Ne doit être utilisé que pour un seul patient.

MODE D'EMPLOI:

- Choisissez la taille de Snuggly ROO jetable adaptée en fonction du poids et de la taille du nourrisson.
- Mettez le Snuggly ROO jetable dans la couveuse, l'incubateur ou le lit du nourrisson. Placez la paroi destinée à soutenir les pieds au fond du lit et les bandes sur les côtés.
- Placez le bébé dans le Snuggly ROO jetable en position couchée sur le ventre sur le dos ou sur le côté, de sorte que les jambes du bébé soient correctement fléchies contre la paroi destinée aux pieds et que la tête et la colonne vertébrale respectent un alignement neutre.
- Placez les mains du bébé près de son visage en position fléchie.
- Tirez une bande sur l'épaule et le bras du bébé afin de maintenir ses mains dans une position confortable et fléchie près de son visage.
- Rentrez la bande sous le Snuggly ROO jetable afin que le poids du bébé la maintienne en place.
- Tirez la bande du côté opposé sur l'autre épaule et l'autre bras pour maintenir une flexion appropriée et rentrez-la sous l'accessoire. Si le bébé est couché sur le côté, vous n'aurez peut-être pas besoin de la deuxième bande.
- Pour maintenir le bébé dans la position souhaitée, la personne chargée des soins peut utiliser un Polly PAL™, Dandle® PAL ou Cozy Cub™ pour soutenir la tête du bébé et l'empêcher de sortir les jambes de la paroi soutenant les pieds.
- Vérifiez que les tubulures ou sondes soient libres après avoir positionné le bébé pour vous assurer que le placement est correct et sûr.

REMARQUE: Pour une meilleure visualisation du bébé, les bandes peuvent être placées sur les côtés.

RANGEMENT ET MISE AU REBUT:

Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou souhaitez signaler un problème relatif à l'utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle•LION Medical.

