

Dandle[®] PAL – Abwischbar

DEHP- und BPA-frei, nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Weitere Informationen finden Sie online auf www.dandleLIONmedical.com

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Bietet Schutz und unterstützt die richtige Lagerung von hospitalisierten Säuglingen in Bauch-, Rücken- und Seitenlage. Kann auch als Hilfe bei der Positionierung medizinischer Geräte im Bett von Säuglingen verwendet werden.

WARNHINWEISE/VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nur für den Krankenhausgebrauch.
- Mit besonderer Vorsicht ist darauf zu achten, dass auf Kleinkinder nicht das gesamte Gewicht des Produkts oder zu viele Mikroscheibchen platziert werden.
- Nicht in der Nähe des Halses oder des Gesichts des Säuglings platzieren oder auf eine Weise verwenden, welche die Atemwege des Säuglings einengen könnten.
- Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination unter Patienten, gemäß den Krankenhausvorschriften reinigen.
- Um das Wachstum kontaminierender Substanzen im Inneren zu verhindern, die abwischbare Abdeckung regelmäßig auf sichtbare Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung überprüfen. Bei Bedarf entsorgen.
- Das Produkt umgehend entsorgen, wenn die Außenseite punktiert oder anderweitig beschädigt wird.

REINIGUNGSHINWEISE:

- Das Dandle PAL ist ein abwischbares und wiederverwendbares Produkt, das nach jeder Verunreinigung und vor dem Gebrauch durch andere Patienten mit einem Standarddesinfektionsmittel mit quaternären Verbindungen für den Krankenhausgebrauch abgewischt werden sollte.
 - Die Vliesbezüge sind für den Einweggebrauch  bestimmt und sollten umgehend entsorgt werden.
- Für Dandle PAL Stoffbezüge (lieferbares Zubehör):
- Die Stoffbezüge können bei Temperaturen bis zu 71 °C in der Maschine gewaschen und getrocknet werden.
 - Es wird ein chlorfreies Bleichmittel empfohlen.



GEBRAUCHSHINWEISE:

- Das Dandle PAL ist eine flexible Lagerungshilfe, die auf vielfältige Weise verwendet werden kann. Das PAL besitzt zwei innere „Positionierungsbeutel“ einen großen Beutel, der das Hufeisen füllt, und einen kleinen Beutel an der rundlichen Oberseite.
- Der hufeisenförmige Teil oder die „Schenkelenden“ können um den Kopf oder die Füße des Säuglings gelegt werden, um eine Begrenzung zu schaffen, eine Körperhaltung zu fixieren oder ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.
 - Der kleinere Positionierungsbeutel kann auf dem größeren platziert werden, falls eine höhere Begrenzung benötigt wird.
 - Der kleinere Positionierungsbeutel kann weit geöffnet und an den Rücken eines Säuglings in Seitenlage gelegt werden zur Fixierung und Wahrung der Körper- und Beugehaltung des Säuglings. Der kleinere Positionierungsbeutel kann auf den größeren geschnallt werden, um zu verhindern, dass das Baby zurückrollt.
 - Der kleinere Positionierungsbeutel kann zum Abstützen eines Schlauchs verwendet werden.
 - Die Mikroscheibchen können in die „Schenkelenden“ geschoben werden, sodass die Schenkelenden gänzlich oder nur teilweise gefüllt sind, je nach medizinischen und

LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

Bitte wenden Sie sich an Dandle·LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.

Rev 4:0525

