

Dandle[®] PAL – Limpiable

Sin DEHP, sin BPA, sin látex de caucho natural.

Hay más información disponible en línea en www.dandleLIONmedical.com

USO PREVISTO:

Aporta soporte y contención al personal clínico para posicionar adecuadamente a bebés hospitalizados en posición prona, supina y lateral. Puede también ser usado para dar soporte al posicionamiento de equipamiento médico dentro de la cama del niño.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES:

- Solo para uso hospitalario.
- Se debe tener especial cuidado para evitar colocar todo el peso o demasiados microdiscos encima de los bebés pequeños.
- No lo coloque cerca del cuello o la cara del bebé ni lo use de ninguna manera que pueda obstruir sus vías respiratorias.
- Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, límpielo de acuerdo con las políticas del hospital.
- Para evitar el crecimiento de cualquier contaminante interno, inspeccione con regularidad la cubierta limpiable en busca de signos visibles de daño o desgaste. Deséchela si es necesario.
- Si la parte exterior del producto se perfora o se ve comprometida de algún otro modo, deséchelo inmediatamente.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

- El Dandle PAL es un producto limpiable y reutilizable que debe limpiarse con un desinfectante cuaternario estándar de hospital cada vez que se ensucie y cada vez que lo use un paciente.
- La funda desechable es para uso de un solo paciente y  debe desecharse inmediatamente.

Para fundas de tela Dandle PAL (accesorio disponible):

- Lavar a máquina y secar a una temperatura de hasta 71 °C.
- Se recomienda utilizar blanqueador sin cloro.



INSTRUCCIONES DE USO:

Dandle PAL es una ayuda de posicionamiento flexible que se puede utilizar de diversas formas. El PAL tiene dos bolsas blandas internas: una bolsa grande que llena la herradura y una bolsa más pequeña en la parte superior redondeada.

- La parte de la herradura o las "patas" pueden colocarse alrededor de la cabeza o los pies del bebé para crear un límite, ayudar a mantener una posición o darle una sensación de seguridad.
- La bolsa blanda más pequeña puede colocarse encima de la más grande si se necesita un límite más alto. La bolsa blanda más pequeña puede mantenerse en su lugar tirando de la correa que se encuentra debajo de la parte de la herradura.
- La herradura puede abrirse completamente y colocarse detrás del bebé en posición lateral para ayudar a mantener la posición y mantener al bebé en flexión. La bolsa más pequeña se puede atar encima de la más grande para evitar que el bebé se mueva hacia atrás.
- La bolsa más pequeña puede utilizarse para sujetar tubos de soporte.
- Los microdiscos pueden desplazarse dentro de las "patas" para que estén más llenas o más vacías y se adapten mejor a las necesidades médicas y de desarrollo del bebé.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.

