

# Dandle® PAL – avtorkningsbar

DEHP-fri, BPA-fri, inte tillverkad med någon naturlig gummilates.

Mer information finns online på [www.dandleLIONmedical.com](http://www.dandleLIONmedical.com)



## AVSEDD ANVÄNDNING:

Innesluter och ger stöd för korrekt positionering i mag-, rygg- och sidolägen för spädbarn som är inlagda på sjukhus. Kan också användas som stöd för medicinsk utrustning i spädbarnets sägn.

## VARNINGAR / FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för sjukhusanvändning.
- Särskild försiktighet ska iaktas för att undvika att lägga hela vikten eller för många mikroskivor ovanpå små spädbarn.
- Placera inte nära spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
- Rengör enligt sjukhusets policyer för att förhindra korskontaminering mellan patienter.
- För att förhindra tillväxt av några inre föroreningar, inspektera regelbundet det avtorkningsbara överdraget för synliga tecken på skada eller slitage. Kassera om det är nödvändigt.
- Om produktens utsida punkteras eller på annat sätt skadas, ska den kasseras omedelbart.

## RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

- Dandle PAL är en avtorkningsbar och återanvändbar produkt som ska torkas ren med ett standarddesinfektionsmedel för sjukhus varje gång den blir smutsig och mellan patientanvändningstillfällen.

- Engångsöverdraget är avsett för användning med en enda patient och ska kasseras omedelbart.



För Dandle PAL:s tygöverdrag (tillgängligt tillbehör):

- Maskintvätta och torka i temperatur upp till 71 °C.
- Klorfritt blekmedel rekommenderas.



## BRUKSANVISNING:

Dandle PAL är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på en mängd olika sätt. PAL har två interna "ärtpåsar" en stor påse som fyller hästskon och en mindre påse på den rundade toppen.

- Hästskodelen, eller "benen", kan placeras runt spädbarnets huvud eller fötter för att skapa en gräns, hjälpa till att bibehålla en ställning eller ge en känsla av trygghet.
- Den mindre ärtpåsen kan placeras ovanpå den större om en högre gräns behövs. Den mindre ärtpåsen kan hållas på plats genom att dra i bandet under hästskodelen.
- Hästskon kan öppnas brett och läggas bakom ett spädbarn som ligger i sidoläge för att hjälpa till att bibehålla ställningen och hålla barnet i ett böjt läge. Den mindre påsen kan fällas över den större för att hålla barnet säkert på plats.
- Den mindre påsen kan användas till att ge stöd åt slangar.
- Mikroskivorna i "benen" kan flyttas runt för att göra dem mer eller mindre fylliga så att de på bästa sätt stödjer bebisens medicinska behov och utvecklingsbehov.

## FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

Kontakta Dandle•LION Medical med eventuella frågor eller kommentarer eller för att rapportera alla frågor som rör användningen av vår produkt.



Tarry Medical Products Inc.  
dba Dandle•LION Medical  
22 Shelter Rock Lane  
Danbury, CT 06810 USA  
+1 203-791-9001

[www.dandleLIONmedical.com](http://www.dandleLIONmedical.com)  
© DandleLION Medical 2009

EC REP

Advena Medical  
Tower Business Centre  
2nd Floor, Tower Street  
Swatar BKR 4013 Malta

Rev 4:0525