

Ne contient pas de caoutchouc de latex naturel. Sans DEHP.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dandleLIONmedical.com.

USAGE PRÉVU:

Assure le maintien et favorise un positionnement adéquat des nourrissons hospitalisés en décubitus ventral, dorsal ou latéral. Peut également être utilisé pour maintenir en place le matériel médical à l'intérieur du lit du nourrisson.

AVERTISSEMENTS/CONTRE-INDICATIONS:

- **Destiné uniquement à un usage hospitalier.**
- **Il convient de prendre des précautions particulières pour éviter de placer tout le poids ou un trop grand nombre de microdisques sur des petits nourrissons.**
- **Éviter de placer l'accessoire près du cou ou du visage du bébé ou d'en faire un usage qui pourrait obstruer ses vois respiratoires.**
- **Pour éviter la contamination croisée entre les patients, nettoyer l'accessoire conformément aux politiques de l'hôpital.**
- **Pour éviter que les perles ne s'échappent du produit et ne constituent un danger pour le bébé, il faut vérifier régulièrement que le tissu n'est pas endommagé et le mettre au rebut si c'est le cas.**

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

Le Dandle PAL est un produit lavable et réutilisable.

- Le lavage et le séchage en machine doivent être effectués à une température maximale de 71°C.
- Il est recommandé d'utiliser un agent de blanchiment sans chlore.



MODE D'EMPLOI:

Le Dandle PAL est un accessoire d'aide au positionnement. Il est flexible et peut être utilisé de différentes manières.

- La partie en fer à cheval, les « jambes », peut être placée autour de la tête ou des pieds du bébé pour créer une barrière, aider à maintenir une position, ou procurer un sentiment de sécurité.
- Pour obtenir une barrière plus élevée, le plus petit sac peut être placé sur le plus grand. Le plus petit sac peut être maintenu en place en faisant passer la bande en dessous de la partie en fer à cheval.
- Le fer à cheval peut être ouvert complètement et placé derrière un bébé en position de décubitus latéral afin d'aider à maintenir la position et de garder le bébé en flexion. Le plus petit sac peut être attaché au-dessus du plus grand pour empêcher le nourrisson de reculer.
- Le plus petit sac peut être utilisé pour soutenir la tubulure.
- Les microdisques peuvent être déplacés dans les « jambes » de façon à les remplir ou les vider, en fonction des besoins médicaux et de développement du bébé.

RANGEMENT ET MISE AU REBUT:

Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou que souhaitez signaler un problème relatif à l'utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle•LION Medical.

