

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. DEHP-frei.

Weitere Informationen finden Sie online auf www.dandleLIONmedical.com

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Bietet Schutz und unterstützt die richtige Lagerung von hospitalisierten Säuglingen in Bauch-, Rücken- und Seitenlage. Kann auch als Hilfe bei der Positionierung medizinischer Geräte im Bett von Säuglingen verwendet werden.

WARNHINWEISE/KONTRAINDIKATIONEN:

- Nur für den Krankenhausgebrauch.
- Mit besonderer Vorsicht ist darauf zu achten, dass auf Kleinkinder nicht das gesamte Gewicht des Produkts oder zu viele Mikroscheibchen plaziert werden.
- Nicht in der Nähe des Halses oder des Gesichts des Säuglings platzieren oder auf eine Weise verwenden, welche die Atemwege des Säuglings einengen könnten.
- Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination unter Patienten, gemäß den Krankenhausvorschriften reinigen.
- Den Stoff regelmäßig auf Beschädigung untersuchen und gegebenenfalls entsorgen, um zu verhindern, dass Perlen aus dem Produkt austreten und zu einer Gefahr für das Baby werden.

REINIGUNGSHINWEISE:

Dandle PAL ist ein waschbares und wiederverwendbares Produkt.

- Maschinenwäsche und Trocken bei einer Temperatur von bis zu 71°C.
- Es wird ein chlorfreies Bleichmittel empfohlen.



GEBRAUCHSHINWEISE:

Das Dandle PAL ist eine flexible Lagerungshilfe, die auf vielfältige Weise verwendet werden kann.

- Das hufeisenförmige Teil oder die „Schenkelenden“ können um den Kopf oder die Füße des Säuglings gelegt werden, um eine Begrenzung zu schaffen, eine Körperhaltung zu fixieren oder ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.
- Der kleinere Beutel kann auf dem größeren platziert werden, falls eine höhere Begrenzung benötigt wird. Der kleinere Beutel kann durch Spannen des Bandes unter das Hufeisenteil in Position gehalten werden.
- Das Hufeisen kann weit geöffnet und an den Rücken eines Säuglings in Seitenlage gelegt werden, zur Fixierung und Wahrung der Körper- und Beugehaltung des Säuglings. Der kleinere Beutel kann auf den größeren Beutel geschnürt werden, um ein Zurückrollen des Säuglings zu unterbinden.
- Der kleinere Positionierungsbeutel kann zum Abstützen eines Schlauchs verwendet werden.
- Die Mikroscheibchen können in die „Schenkelenden“ geschoben werden, sodass die Schenkelenden gänzlich oder nur teilweise gefüllt sind, je nach medizinischen und entwicklungsbezogenen Erfordernissen des Säuglings.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

Bitte wenden Sie sich an Dandle·LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.

