

# Cuscini in gel Dandle•LION®

Dandle•LION®  
MEDICAL

Realizzato senza utilizzo di lattice in gomma naturale. Non contiene DEHP. Non contiene BPA.

Ulteriori informazioni sono disponibili online su [www.dandleLIONmedical.com](http://www.dandleLIONmedical.com)

## USO PREVISTO / BENEFICI CLINICI:

I cuscini in gel Dandle•LION offrono una superficie morbida e flessibile per sostenere e supportare la testa o il corpo del bambino. I cuscini in gel sono di dimensioni adeguate per l'uso nel Dandle® ROO2 e possono contribuire a ridurre la necessità di riposizionamenti frequenti. I cuscini sono realizzati con una morbida pellicola di polietilene riempita con un gel alimentare atossico a base d'acqua, resistente alla proliferazione batterica e fungina. Disponibile in otto misure, ogni cuscino in gel è dotato di un rivestimento in cotone che può essere lavato e riutilizzato per altri pazienti. Sono inoltre disponibili rivestimenti monouso.

## AVVERTENZE / PRECAUZIONI

- Solo per uso ospedaliero.
- Per evitare di limitare le vie respiratorie del bambino, non posizionarlo a faccia in giù sul cuscino in gel.
- È necessaria la supervisione medica.
- Non riscaldare poiché potrebbero formarsi dei punti molto caldi.
- Utilizzare sempre con un rivestimento.
- Non sottoporre il gel ai raggi X poiché le tasche d'aria potrebbero deformarsi.
- Utilizzare su un solo paziente.



## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

- Cuscino in gel: Per evitare la contaminazione incrociata tra pazienti, i cuscini in gel sono monouso. L'eventuale riutilizzo dei cuscini su più pazienti non è garantito dal produttore e deve essere eseguito solo dopo che l'utente abbia convalidato un metodo di sanificazione/ disinfezione appropriato.
- Rivestimento di cotone del cuscino in gel: Lavare in lavatrice e asciugare a una temperatura massima di 71°C. Non utilizzare candeggina a base di cloro.



## ISTRUZIONI PER L'USO:

- Se necessario, preriscaldare il cuscino in gel nell'incubatrice o sotto l'acqua tiepida. Il gel manterrà la temperatura ambiente.
- Posizionare il cuscino dove necessario.
- Per un cuscino più pieno, spingere il gel su un lato e ripiegare parte la sacca sottostante per ottenere la pienezza desiderata.
- Dopo un uso prolungato in un ambiente caldo, il gel inizia a rompersi. Il gel diventa acquoso e la sacca si gonfia. In tal caso, smaltire il cuscino.

## CONSERVAZIONE:

Conservare a una temperatura inferiore a 24°C.

## SMALTIMENTO:

Nessun requisito specifico.

Contattare Dandle•LION Medical per eventuali domande o commenti  
oppure per segnalare qualsiasi problema quando utilizzato.



Tarry Medical Products Inc.  
dba Dandle•LION Medical  
22 Shelter Rock Lane  
Danbury, CT 06810 USA  
+1 203-791-9001

[www.dandleLIONmedical.com](http://www.dandleLIONmedical.com)  
© DandleLION Medical 2021

EC REP

Advena Medical  
Tower Business Centre  
2nd Floor, Tower Street  
Swatar BKR 4013 Malta

Rev10:0824