

Mini PAL™

Realizzato senza utilizzo di lattice in gomma naturale. Non contiene DEHP.



USO PREVISTO:

Fornire supporto per il posizionamento dei neonati, specialmente i neonati ELBW (Extremely Low Birth Weight, Peso nascita estremamente basso), in posizione prona, supina, o laterale.

AVVERTENZE / PRECAUZIONI:

- Solo per uso ospedaliero.
- Non posizionare vicino al collo o al viso del neonato e non utilizzare in modo tale da ostruire le vie respiratorie del bambino.
- Prestare particolare attenzione a non posizionare tutto il peso o troppi micro dischi sopra il neonato.
- Per evitare la contaminazione incrociata tra pazienti, pulire secondo le politiche dell'ospedale.
- Per evitare che i micro dischi escano dal prodotto e costituiscano un pericolo per il bambino, ispezionare regolarmente il tessuto per verificare l'eventuale presenza di segni di danni o usura. Smaltire immediatamente se la parte esterna del prodotto è danneggiata o in qualche modo compromessa.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

Mini PAL è un prodotto lavabile e riutilizzabile.

- Lavare in lavatrice e asciugare a una temperatura massima di 71°C.
- Si consiglia l'uso di candeggina non clorata.



ISTRUZIONI PER L'USO:

Mini PAL è un ausilio flessibile per il posizionamento, utilizzabile in diversi modi per tutti i bambini, ed è stato sviluppato appositamente per qualli di peso < 800 g. Quando utilizzato all'interno di XS Dandle® ROO2, Dandle® ROO Lite, o Dandle® WRAP Stretch, Mini PAL riempirà lo spazio in fondo all'area della sacca per migliorare la funzionalità del prodotto.

- In posizione supina, con la testa del bambino in alto contro il poggiatesta, posizionare l'elemento base più largo ("corpo") nello spazio tra la parte inferiore del bambino e il punto in cui la sacca incontra la base. Le gambe del bambino devono poggiare sul "corpo" con il bacino in retroversione. Utilizzare i due elementi simmetrici che si estendono dal "corpo" ("gambe") come coccola accanto al busto, sotto le braccia, riempiendo lo spazio e contribuendo a mantenere fianchi e spalle in flessione. Con il Mini PAL all'interno del dispositivo di posizionamento, le ali e la sacca si allineeranno correttamente.
- Con il bambino in posizione laterale, collocare il "corpo" dietro il bambino e mettere le "gambe" leggere sulle spalle e sui fianchi del bambino per mantenere la posizione e garantire comfort.
- È possibile utilizzarlo con i bambini più grandi per contribuire a supportare il posizionamento, fornire un feedback propriocettivo o supportare tubi/attrezzatura.
- Se non è disponibile un poggiatesta e non è possibile garantire un posizionamento intermedio neutro della testa, collocare il Mini PAL intorno alla testa del neonato con le "gambe" sotto le spalle del bambino, a sostegno delle braccia in flessione.
- Se è necessario estendere le estremità, posizionare il "corpo" sotto l'articolazione e le "gambe" sopra e sotto l'articolazione per mantenerla in estensione.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Nessun requisito specifico.

Contattare Dandle·LION Medical per eventuali domande o commenti
oppure per segnalare qualsiasi problema quando utilizzato.

