

Polly PAL™

Není vyrobená z přírodního gumového latexu. Neobsahuje DEHP.

Více informací se dozvíte na www.dandleLIONmedical.com

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Pomáhá klinickému personálu správně polohovat hospitalizované kojence do polohy na břiše, na zádech a na boku. Může být rovněž použit k podpoře umístění zdravotnického vybavení uvnitř lůžka kojence.

UPOZORNĚNÍ:

- **Určeno pouze pro použití v nemocnici.**
- **Je třeba dbát zvláštní opatrnosti, abyste nepoložili pomůcku na malé kojence celou váhou nebo na ně umístili příliš velké množství mikro kuliček.**
- **Neumísťujte ji poblíž šije nebo obličejové dítěte ani ji nepoužívejte způsobem, který by mohl omezit jeho dýchací cesty.**
- **Abyste zabránili křížové kontaminaci mezi pacienty, omyjte ji a osušte v souladu se zásadami nemocnice.**
- **Pokud dojde k rozvolnění mikro kuliček nebo se v látkovém potahu objeví díra, okamžitě podložku zlikvidujte.**

POKyny K ČIŠTĚNÍ:

Polly PAL je omyvatelný a opakovaně použitelný výrobek.

- Perte v pračce a sušte při teplotě do 71°C.
- Doporučuje se používat bělidla bez chlóru.



NÁVOD K POUŽITÍ:

Polly PAL je flexibilní polohovací pomůcka, která nabízí široké možnosti využití.

- Umístěte ji kolem hlavy nebo nohou dítěte, abyste kolem něj vytvořili zábranu, pomohli ho udržovat v určité poloze nebo mu dodali pocit bezpečí.
- Použijte ji k podepření dudlíku nebo podpůrné hadičky.
- Přemístěte mikro kuličky do různých míst, aby se některé části nebo úseky naplnily více nebo naopak méně a přizpůsobily se tak ostatnímu vybavení nebo potřebám dítěte při polohování.

LIKVIDACE A SKLADOVÁNÍ:

Bez zvláštních požadavků.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nebo nahlášení jakéhokoli problému s používáním našeho výrobku se obraťte na společnost Dandle•LION Medical.



Rev 2:0525