

Polly PAL™



Niet vervaardigd met natuurrubberlatex. Vrij van DEHP.

Meer informatie is online beschikbaar op www.dandleLIONmedical.com

BEOOGD GEBRUIK:

Helpt zorgverleners bij het correct positioneren van zuigelingen in het ziekenhuis in buik-, rug- en zijligging. Kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van de positionering van medische apparatuur in het bed van de zuigeling.

WAARSCHUWINGEN:

- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Wees extra voorzichtig met kleine baby's en voorkom dat ze het volledige gewicht of te veel microschijven bovenop zich krijgen.
- Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Ter voorkoming van kruisbesmetting tussen patiënten, volgens de voorschriften van het ziekenhuis wassen en drogen.
- Onmiddellijk wegwerpen ingeval er ooit microschijven losraken of een gaatje in de stoffen bekleding komt.

REINIGINGSVOORSCHRIFTEN:

De Polly PAL is een wasbaar en herbruikbaar product.

- In de machine wassen en drogen tot een temperatuur van 71°C.
- Aangeraden wordt een bleekmiddel dat geen shloor bevat.



GEBRUIKSAANWIJZING:

De Polly PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden.

- Rond baby's hoofd of voeten plaatsen ter afbakening, ter behoud van een positie of om een gevoel van veiligheid te geven.
- Te gebruiken als ondersteuning van een fopspeen of een slang.
- Verplaats de microschijven om delen voller of minder vol te maken, naargelang de vereisten van de apparatuur of de positie van de baby.

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Voor vragen, opmerkingen of het melden van een probleem met het gebruik van ons product, neem contact op met Dandle•LION Medical.

