

Polly PAL™



Ne contient pas de caoutchouc naturel. Sans DEHP.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dandleLIONmedical.com.

USAGE PRÉVU:

Aide les cliniciens à positionner correctement les nourrissons hospitalisés en décubitus ventral, dorsal et latéral. Peut également être utilisé pour maintenir en place le matériel médical à l'intérieur du lit du nourrisson.

AVERTISSEMENTS:

- **Destiné uniquement à un usage hospitalier.**
- **Il convient de prendre des précautions particulières pour éviter de placer tout le poids ou un trop grand nombre de micro billes sur des petits bébés.**
- **Évitez de placer l'accessoire près du cou ou du visage du bébé ou d'en faire un usage qui pourrait obstruer ses voies respiratoires.**
- **Pour éviter la contamination croisée entre les patients, lavez et séchez en respectant strictement les politiques de l'hôpital.**
- **Si les micro billes se détachent ou si un trou apparaît sur la housse en tissu, mettez le produit au rebut immédiatement.**

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

Le Polly PAL est un produit lavable et réutilisable.

- Le lavage et séchage en machine doit se faire à une température maximale de 71°C.
- Il est recommandé d'utiliser un agent de blanchiment sans chlore.



MODE D'EMPLOI:

Le Polly PAL est un accessoire d'aide au positionnement. Il est flexible et peut être utilisé de différentes manières.

- Placez-le autour de la tête ou des pieds du bébé pour créer une limite, aider à maintenir une position ou procurer un sentiment de sécurité.
- Il est idéal pour maintenir une tétine ou soutenir une sonde.
- Pour adapter l'accessoire aux équipements ou aux besoins de positionnement du bébé, déplacez les micro billes afin de remplir différentes parties ou sections.

RANGEMENT ET MISE AU REBUT:

Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou souhaitez signaler un problème relatif à l'utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle•LION Medical.

