

Polly PAL™

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. DEHP-frei.

Weitere Informationen finden Sie online auf www.dandleLIONmedical.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Hilft Pflegekräften bei der richtigen Lagerung von hospitalisierten Säuglingen in Bauch-, Rücken- und Seitenlage. Kann auch als Hilfe bei der Positionierung medizinischer Geräte im Bett von Säuglingen verwendet werden.

WARNHINWEISE:

- **Nur für den Krankenhausgebrauch.**
- **Mit besonderer Vorsicht ist darauf zu achten, dass auf Kleinkinder nicht das gesamte Gewicht des Produkts oder zu viele Mikroscheibchen platziert werden.**
- **Nicht in der Nähe des Halses oder des Gesichts des Säuglings platzieren oder auf eine Weise verwenden, welche die Atemwege des Säuglings einengen könnten.**
- **Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination unter Patienten, die Mikroscheibchen gemäß den Krankenhausvorschriften waschen und trocknen.**
- **Das Produkt umgehend entsorgen, falls sich die Mikroscheibchen jemals lösen oder ein Loch im Stoffbezug entsteht.**

REINIGUNGSHINWEISE:

Polly PAL ist ein waschbares und wiederverwendbares Produkt.

- Maschinenwäsche und Trocknen bei einer Temperatur von bis zu 71°C.
- Es wird ein chlorfreies Bleichmittel empfohlen.



GEBRAUCHSHINWEISE:

Polly PAL ist eine flexible Lagerungshilfe, die auf vielfältige Weise verwendet werden kann.

- Legen Sie Polly PAL um den Kopf oder die Füße des Säuglings, um eine Begrenzung zu schaffen, eine Körperhaltung zu fixieren oder ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.
- Verwenden Sie das Produkt, um einen Schnuller oder einen Schlauch zu stützen.
- Schieben Sie die Mikroscheibchen an verschiedene Stellen, um Teile oder Abschnitte des Produkts mehr oder weniger zu befüllen, um Geräteanforderungen oder die Lagerungsbedürfnisse des Säuglings zu berücksichtigen.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

Bitte wenden Sie sich an Dandle•LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.

