

Polly PAL™

Realizzato senza utilizzo di lattice in gomma naturale. Non contiene DEHP.

Ulteriori informazioni sono disponibili online su www.dandleLIONmedical.com.

USO PREVISTO:

Aiuta i medici a posizionare correttamente i neonati ospedalizzati in posizione prona, supina, e laterale. Può essere inoltre utilizzato per supportare il posizionamento dell'apparecchiatura medica all'interno del letto del neonato.

AVVERTENZE / PRECAUZIONI:

- Solo per uso ospedaliero.
- Prestare particolare attenzione a non posizionare tutto il peso o troppi micro dischi sopra il neonato.
- Non posizionare vicino al collo o al viso del neonato e non utilizzare in modo tale da ostruire le vie respiratorie del bambino.
- Per evitare la contaminazione incrociata tra pazienti, pulire secondo le politiche dell'ospedale.
- Se i micro dischi dovessero allentarsi o se si verificasse un foro nel rivestimento in tessuto, smaltire immediatamente.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

Polly PAL è un prodotto lavabile e riutilizzabile.

- Lavare in lavatrice e asciugare a una temperatura massima di 71°C.
- Si consiglia l'uso di candeggina non clorata.



ISTRUZIONI PER L'USO:

Polly PAL è un ausilio flessibile per il posizionamento e può essere utilizzato in diversi modi.

- Posizionare intorno alla testa o ai piedi del bambino per creare un contenimento, contribuire a mantenere una posizione o garantire maggiore sicurezza.
- Utilizzarlo per appoggiare un ciuccio o per sostenere un tubo.
- Spostare i micro dischi in punti diversi per rendere le parti o le sezioni più o meno piene per adattarle alle apparecchiature o alle esigenze di posizionamento del bambino.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Nessun requisito specifico.

Contattare Dandle•LION Medical per eventuali domande o commenti
oppure per segnalare qualsiasi problema quando utilizzato.

