

Polly PAL™

Niewykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.

Dodatkowe informacje są dostępne online w witrynie www.dandleLIONmedical.com.

PRZEZNACZENIE:

Pomoc dla lekarzy w prawidłowym pozycjonowaniu hospitalizowanych dzieci w pozycji na brzuchu, na plecach i na boku. Wyrób może być także używany do pozycjonowania sprzętu medycznego w dziecięcym łóżeczku.

OSTRZEŻENIE / PRZECIWWSKAZANIA:

- **Wyłącznie do użytku szpitalnego.**
- **Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec umieszczeniu całego ciężaru lub zbyt wielu mikrogranulek na małym niemowlęciu.**
- **Nie umieszczać w pobliżu szyi lub twarzy dziecka i nie używać w sposób, który mógłby ograniczyć drożność dróg oddechowych niemowlęcia.**
- **Aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu między pacjentami, należy prać i suszyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w szpitalu.**
- **Jeśli mikrogranulki wydostaną się na zewnątrz lub w pokryciu materiałowym powstanie dziura, niezwłocznie usunąć produkt.**

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:

Polly PAL jest produktem nadającym się do prania i ponownego użytku.

- Prać w palce i suszyć w temperaturze do 71°C.
- Zalecany jest wybielacz niezawierający chloru.



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Polly PAL to elastyczna pomoc do pozycjonowania, która może być wykorzystana na różne sposoby.

- Umieścić w pobliżu główki lub stóp niemowlęcia, aby utworzyć ograniczenie, pomóc w utrzymaniu pozycji lub dać poczucie bezpieczeństwa.
- Używać do podtrzymania smoczka lub oparcia rurek.
- Przesuwać mikrogranulki w inne miejsca, aby bardziej lub mniej wypełnić pewne części w celu dostosowania do sprzętu lub potrzeb związanych z ułożeniem dziecka.

UTYLIZACJA I PRZECHOWYWANIE:

Brak specjalnych wymagań.

Prosimy o kontakt z DandleLION Medical w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag lub w celu zgłoszenia problemów z użytkowaniem naszego produktu.

